

一般医療機器 医 03 手術用手袋及び指サック
非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000

WiSM ニトリルグローブ トリプルフリー

再使用禁止・未滅菌

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- 非天然ゴム製パウダーフリー
アレルギーの原因の一つであるプロテインを含まない手に優しいニトリルゴム製のパウダーフリータイプ
- 使い捨てタイプ
- 左右兼用、未滅菌
- SS, S, M, L の 4 サイズ



【品目仕様等】

- 色調：ホワイト
- 老化前：引張り強さ 14Mpa 以上
切断時伸び 500%以上
- 老化後：引張り強さ 14Mpa 以上
切断時伸び 400%以上

【使用目的又は効果】

手術を除いた、検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成ゴム手袋。（歯科用手袋を除く）

【使用方法等】

箱を開封して、グローブを取り出し装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - 合成ニトリルゴムは、体質により痒み、かぶれ、発疹などの症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には使用を中止し、適切な処置を施してください。
2. 重要な基本的注意
 - 包装が破損していたり、汚損していた場合には、使用しないでください。
 - 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。

3. 相互作用

- 薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上、使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 - 水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避けて常温で保管すること。
2. 使用の期限
 - 包装後 5 年（製造元データによる）
使用の期限は包装箱に記載する。

【包装】

200 枚入／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル9F
TEL 078-327-2333

外国製造所国名 : マレーシア
外国製造業者 : YTY Industry (Manjung) SDN. BHD.
外国製造業者 : CAREPLUS (M) SDN. BHD.