

一般医療機器 医 04 整形用品
医療用不織布 JMDN34655000

滅菌 Y カット不織布ガーゼ

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 破損使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- ポリエステル及びビスコースレーヨン素材混紡の不織布ガーゼで不織布の網目構造により血液・体液等を吸収しやすくしたもの。
Y 字型の切込みによりカテーテル、カニューレ等の挿入部に当てて保護するのに適している。
個包装はE O ガスによる滅菌がされている。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材である。

【使用方法等】

本品は滅菌済みなので、汚染されないように取扱い願います。

【使用上の注意】

- 本品は使い捨ての為、再使用はしないでください。
- パウチ包装等に開封、破損、汚染等が見られる場合は滅菌済み製品としての使用はしないでください。
- 肌の弱い方は場合は、かゆみ、かぶれ等を生じることがあります。このような症状が現れた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
- 滅菌済み製品なので開封後は汚染に注意し速やかにご使用ください。
- ガーゼを体内に留置しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
- 本品は滅菌済みなので、包装を破らないように保管してください。

2. 有効期間

- 上記条件のもとで包装後 5 年（包装袋に表示）（製造業者データに基づく）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド

〒650-0023

兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10読売神戸ビル9F

TEL 078-327-2333

外国製造所国名：中華人民共和国

外国製造業者：Allmed Medical Products Co., Ltd.