

一般医療機器 医 03 手術用手袋及び指サック  
天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70977000

## セコンドスキン ラテックス手袋 パウダーフリー

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止

### 【形状・構造及び原理等】

- 天然ゴムラテックス製パウダーフリー  
アレルギーの原因の一つであるプロテインを極力抑えた手に優しいパウダーフリータイプ
- 使い捨てタイプ
- 左右兼用、未滅菌



### 【品目仕様等】

- 老化前：引張り強さ 18Mpa 以上  
切断時伸び 650%以上
- 老化後：引張り強さ 14Mpa 以上  
切断時伸び 500%以上

### 【使用目的又は効果】

手術を除いた、検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する天然ゴム手袋。

### 【使用方法等】

箱を開封して、グローブを取り出し装着する。

### 【使用上の注意】

#### 1. 使用注意

- 天然ゴムは、痒み、発疹、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を施してください。
- 天然ゴムと接触する機会が多い方々は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意してください。

#### 2. 重要な基本的注意

- 包装が破損していたり、汚損していた場合には、使用しないでください。
- 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。

#### 3. 相互作用

- 薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上、使用してください。

### 【保管方法及び使用期間等】

#### 1. 保管方法

- 水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所を避けて常温で保管すること。

#### 2. 使用期間

- 包装後 5 年(製造元データによる)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 製造販売元

A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド  
〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル9F  
TEL 078-327-2333

外国製造所国名：マレーシア

外国製造業者：TOP GLOVE SDN. BHD.