

一般医療機器 医 03 手術用手袋及び指サック
非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000

セーフタッチ クロロプレングローブ パウダーフリー

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- 非天然ゴム製パウダーフリー
アレルギーの原因のひとつであるプロテインを含まない手に
優しい合成ゴム製（ポリクロロブレン）のパウダーフリータイプ
- 使い捨てタイプ
- 左右兼用、未滅菌
- XS, S, M, L, XL の 5 サイズ



【品目仕様等】

- 色調：ブルー
- 老化前：引張強さ 14MPa 以上
切断時伸び 500%以上
- 老化後：引張強さ 14MPa 以上
切断時伸び 400%以上

【使用目的又は効果】

検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、
患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

箱を開封して、グローブを取り出し左右の手に装着する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 複数の患者には使用しないでください。
 - 合成ゴム（ポリクロロブレン）は、体質により痒み、かぶれ、発疹などの症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には使用を中止し、適切な処置を施してください。
 - 包装が破損していたり、汚損していたり、ピンホール、異物などの異常が認められた場合には、使用しないでください。
 - 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。
 - 本品を廃棄する場合は、感染防止に留意し安全な方法で処分してください。

2. 相互作用

- 薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上、使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避けて常温で保管すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。

2. 有効期間

- 上記条件の下もとで製造後 3 カ年（製造元データによる）
使用の期限は包装箱に記載する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10読売神戸ビル9F
TEL 078-327-2333

外国製造所国名：インドネシア

外国製造業者：PT. Medisafe Technologies