

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック
天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70977000

セーフタッチ ラテックスグローブ パウダーフリー

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止

【形状・構造及び原理等】

- 天然ゴムラテックス製パウダーフリー
アレルギーの原因の一つであるプロテインを極力抑えた手に優しいパウダーフリータイプ
- 使い捨てタイプ
- 左右兼用、未滅菌



【品目仕様等】

- 老化前: 引張り強さ 21Mpa 以上
切断時伸び 700%以上
- 老化後: 引張り強さ 16Mpa 以上
切断時伸び 500%以上

【使用目的又は効果】

検査・検診用、感染保護用として医療施設等において用いる天然ゴム手袋である。

【使用方法等】

箱を開封して、グローブを取り出し左右の手に装着する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 天然ゴムは、痒み、発疹、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を施してください。
- 天然ゴムと接触する機会が多い方々は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意してください。
- 包装が破損していたり、汚損していた場合には、使用しないでください。
- 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。

2. 相互作用

- 薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上、使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避けて常温で保管すること。

2. 有効期間

- 上記保管条件のもとで
● 包装後3年(製造元データによる)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0023

**兵庫県神戸市中央区栄町通一丁目210号読売神戸ビル9階
TEL 078-327-2333

*外国製造所国名: マレーシア