

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック
天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70977000

メディコム プロケア ラテックスグローブ パウダーフリー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止

【形状・構造及び原理等】

- 天然ゴムラテックス製パウダーフリー
アレルギーの原因の一つであるプロテインを極力抑えた手に優しいパウダーフリータイプ
- 使い捨てタイプ
- 左右兼用、未滅菌
- XS、S、M、Lの4サイズ



【品目仕様等】

- 老化前：引張り強さ 18Mpa 以上
切断時伸び 650%以上
- 老化後：引張り強さ 14Mpa 以上
切断時伸び 500%以上

【使用目的又は効果】

検査・検診、感染保護用として医療施設等において用いる天然ゴム手袋である。

【使用方法等】

箱を開封して、グローブを取り出し装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- 天然ゴムは、痒み、発疹、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を施してください。
- 天然ゴムと接触する機会の多い方々は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意してください。

2. 重要な基本的注意

- 包装が破損していたり、汚損していた場合には、使用しないでください。
- 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。
- 包装を開封したらすぐに使用してください。

3. 相互作用

- 薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上、使用してください。

【保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法

- 水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温多湿、埃、塩分、硫黄分を含んだ空気等による悪影響の生じる恐れのない場所に保管してください。
- 化学薬品の保管場所やオゾンなどのガスの発生しやすい場所に保管しないでください。

2. 使用期間

- 上記保管条件のもとで、
●包装後5年（製造元データによる）

【包装】

100枚入/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル9F
TEL 078-327-2333

外国製造所国名：タイ

外国製造業者：

Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック
天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70977000

プロケア ラテックスグローブ パウダーフリー

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止

【形状・構造及び原理等】

天然ゴムラテックス製パウダーフリー
アレルギーの原因の一つであるプロテインを極力抑えた手に
優しいパウダーフリータイプ
使い捨てタイプ
左右兼用、未滅菌
XS、S、M、Lの4サイズ



【品目仕様等】

老化前：引張り強さ	18Mpa 以上
切断時伸び	650% 以上
老化後：引張り強さ	14Mpa 以上
切断時伸び	500% 以上

【使用目的又は効果】

検査・検診、感染保護用として医療施設等において用いる天然ゴム手袋である。

【使用方法等】

箱を開封して、グローブを取り出し装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

天然ゴムは、痒み、発疹、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、
血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こす
ことがあります。このような症状を起こした場合には直ちに
使用を中止し、適切な処置を施してください。
天然ゴムと接触する機会の多い方々は天然ゴムアレルギー
発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関して
は注意してください。

2. 重要な基本的注意

包装が破損していたり、汚損していた場合には、使用しない
でください。
刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがあり
ますのでご注意ください。
包装を開封したらすぐに使用してください。

3. 相互作用

薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合が
ありますので確認の上、使用してください。

【保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温多湿、埃、塩分、
硫黄分を含んだ空気等による悪影響の生じる恐れのない場
所に保管してください。
化学薬品の保管場所やオゾンなどのガスの発生しやすい場
所に保管しないでください。

2. 使用期間

上記保管条件のもとで、
包装後5年（製造元データによる）

【包装】

100枚入 / 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

A・R・メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル9F
TEL 078-327-2333

外国製造所国名：マレーシア

外国製造業者：Hartalega NGC Sdn. Bhd.