

2023年2月 作成(第1版)
2023年5月 改訂(第2版)
2025年4月 改訂(第3版)

製造販売届出番号：28B3X00001000062

一般医療機器 医 03 手術用手袋及び指サック
天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70977000

セーフバシック ラテックスグローブ イージーフィット パウダーフリー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の
使用及び患者への使用は禁止

【形状・構造及び原理等】

- 天然ラテックスゴム製パウダーフリー
アレルギーの原因の一つであるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ。
- 未滅菌
- 使い捨て
- 左右兼用

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

箱を開封して、グローブを取り出し装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - 複数の患者に同一のグローブを使用しないでください。
 - 本品は使い捨てですので、再使用しないでください。
 - 天然ゴムは、痒み、かぶれ、発疹、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下などのアレルギー性症状を起こすことがあります。
このような症状を起こした場合にはただちに使用を中止し、適切な処置を施してください。
 - 天然ゴムと接触する機会の多い方々はアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意してください。
 - 包装が破損していたり、汚損していたり、異物などの異常が認められた場合には、使用しないでください。
 - 火、熱、熱湯に注意し、熱いものに直接触れないでください。
 - 刃物など鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますので注意してください。
 - 水ぬれに注意し、高温の場所、直接日光の当たる場所、オゾンや湿気の多い場所は避け、常温で保管してください。
 - 本品を廃棄する場合は、感染防止に留意し安全な方法で処分してください。
2. 相互作用
 - 薬品、溶剤などによっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上、使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - 水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温、湿気、埃、塩分、硫黄分を含んだ空気等による悪影響の生じる恐れのない場所に保管してください。
 - 化学薬品の保管場所やオゾンなどのガスの発生しやすい場所に保管しないでください。
2. 有効期間
 - 上記条件のもとで包装後5カ年（製造元データによる）

【包装】

100枚入／箱

【製造販売業者及び外国製造所国名】

- 製造販売業者
A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0023
兵庫県神戸市中央区栄町通一丁目2番10号読売神戸ビル9階
TEL 078-327-2333
- 外国製造所国名
マレーシア