

セーフタッチ ファングリップ ラテックスグローブ パウダーフリー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止

【形状・構造及び原理等】

- 天然ゴムラテックス製パウダーフリー
アレルギーの原因の一つであるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ
- 未滅菌
- 使い捨て
- 左右兼用

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

箱を開封して、グローブを取り出し左右の手に装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - 複数の患者に同一のグローブを使用しないでください。
 - 本品は使い捨てですので、再使用しないでください。
 - 天然ゴムは、痒み、かぶれ、発疹、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下などのアレルギー性症状を起こすことがあります。
このような症状を起こした場合にはただちに使用を中止し、適切な処置を施してください。
 - 天然ゴムと接触する機会の多い方々はアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意してください。
 - 包装が破損していたり、汚損していたり、異物などの異常が認められた場合には、使用しないでください。
 - 火、熱、熱湯に注意し、熱いものに直接触れないでください。
 - 刃物など鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますので注意してください。
 - 水ぬれに注意し、高温の場所、直接日光の当たる場所、オゾンや湿気の多い場所は避け、常温で保管してください。
 - 本品を廃棄する場合は、感染防止に留意し安全な方法で処分してください。
2. 相互作用
 - 薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上、使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - 水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温、湿気、埃、塩分、硫黄分を含んだ空気等による悪影響の生じる恐れのない場所に保管してください。
 - 化学薬品の保管場所やオゾンなどのガスの発生しやすい場所に保管しないでください。
2. 有効期間
 - 上記保管条件のもとで包装後 5 年（製造元データによる）

【包装】

100 枚入／箱

【製造販売業者及び外国製造所国名】

- 製造販売業者
A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0033
兵庫県神戸市中央区栄町通一丁目 2 番 10 号読売神戸ビル 9 階
078-327-2333
- 外国製造所国名
マレーシア