

添付文書

2021 年 11 月 25 日作成（第 1 版）

届出番号:13B1X10131000013

衛生材料(01) 月経処理用タンポン
一般医療機器 生理用タンポン JMDN コード:35694000


オーカスリムカップ

【禁忌・禁止】

本品を添付文書に記載以外の方法・用途で使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

本品はカップ部とステム部により構成されたシリコーン製ものです。

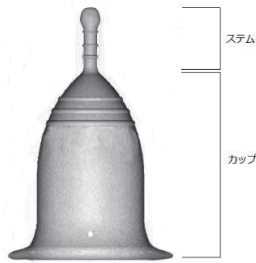

	サイズ	容量 (mL)	直径 (mm)	カップ 長 (mm)	ステム (mm)
オーカスリム カップ	フリー	19.0	42.0	58.0	15.0

【使用目的又は効果】

月経もしくは他の膣分泌物を回収するために膣口に挿入するカップ状の詰め物です。

【使用方法等】



(1) 準備

- ・カップ部分にある空気穴が開いていることを確認する。
- ・使用前に煮沸消毒を行う。＊鍋で水を沸騰させ、カップを入れて約 10 分間消毒する。


(2) 挿入方法

- ・挿入前に手指をよく洗浄する。

- ・ステムが下向きになるように持ち、カップが膣内に入りやすいように内側に折り込む（図 1, 2）。

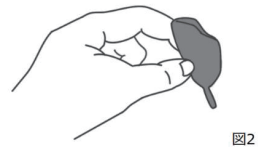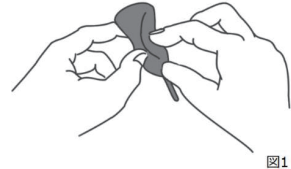

- ・トイレ等で中腰の姿勢になり、カップを膣の入り口から尾骨に向かって挿入する（図 3）。

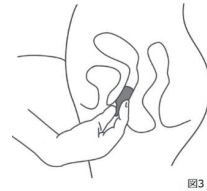


- ・カップを回したり、周りをなぞるようにして、カップが完全に開いていることを確認し、ステムが膣外に出ていないことを確認する。



本品を使用する前に、必ず添付文書をよく読み、必要な時に読めるように保管してください。

(3) 取り出し方

- ・取り出す前に手指を洗淨する。
- ・いきみながらカップの底をつまむようにして空気を抜きながら膣壁と密着を解除する（図4）。

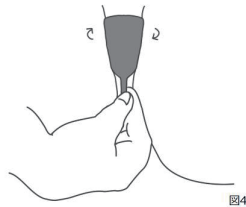

- ・ゆっくりとカップを取り出し、中身をトイレや排水溝に流す。

(4) 使用後（お手入れ方法）

- ・終了後は低刺激性石鹸やハンドソープ等で洗淨した後、乾燥させ、指定の袋または容器にて保管する。

【使用上の注意】

1. 使用前

- ・本品に異常がある場合は使用しないこと。
- ・添付文書の指示に従うこと。
- ・子宮内避妊具（IUD）を使用している場合、本品の使用について医師と相談すること。
- ・これまでトキシックショック症候群（TSS）を発症したことがある場合、本品の使用について医師と相談すること。
- ・膣内や膣口等に痛みや痒みがある場合は本品を使用しないこと。
- ・分泌物（おりもの）に異臭がある場合、本品の使用について医師と相談すること。

2. 使用中

- ・経血量に関係なく、長くても12時間ごとにカップを取り出し、洗淨すること。
- ・性交前には本品を取り外すこと。
- ・膣内や膣口に痛みや痒みがある場合や排尿時に不快感がある場合は使用を中止し、医師と相談すること。
- ・これまで本品によってトキシックショック症候群（TSS）が発症した事例はありませんが、体調・体質によっては発症の可能性があることも

考えられます。次に記載するような症状が発生した場合、直ちに本品の使用を中止し、この添付文書をお持ちの上、産婦人科などの専門医を受診すること。

※トキシックショック症候群（TSS）の症状：急な発熱、発疹、血圧低下、倦怠感、嘔吐、下痢、粘膜充血など。

3. 使用後

- ・万一、取り出せなくなった場合は、すぐに産婦人科などを受診し取り出してもらうこと。

【保管方法】

- ・使用しない時は同梱のケースに入れ、子供や動物の手の届かないところに保管すること。
- ・直射日光、水濡れ、火気、高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

【取り扱い上の注意】

- ・目視でひび割れや破損の兆候に気が付いたときは、直ちに新しい製品に交換すること。
- ・本品はトイレで流さないこと。破棄に関しましては、お住いの自治体の指示に従って処理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： M.I ジャパン株式会社

製造業者： Xi'an Furuize Biotechnology Co., Ltd
(中華人民共和国：China)

販売元： 株式会社 intervia

TEL： 0570-055-517