

機械器具 11 放射線障害防護用器具
放射線防護用顔面防護具 (38363000)
一般医療機器

CT アイシールド

【形状・構造及び原理等】

本品は薄い1枚のタンゲステン、ビスマス、アンチモンとこれを覆う耐液体性の外部カバーで構成され、眼部の形状に合わせた布状の形態である。

【使用目的又は効果】

CT撮影時に伴う一次放射線や散乱放射線による unnecessary 被曝から患者の眼を保護します。

【使用方法等】

眼部を覆うように装着してください。

【使用上の注意】

- ①水等がかからない場所で使用すること。
- ②落下させたり、強い衝撃を与えたりすると変形・破損することがありますので丁寧に扱うこと。
- ③本品を廃棄する場合は産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【保管方法及び使用期間等】

保管方法

直射日光が当たる場所、強い紫外線が当たる場所、各種放射線が当たる場所、高温多湿やほこりの多い場所は避けて保管してください。

【保守、点検に係る事項】

使用者の保守、点検

使用者による日常及び定期点検を必ず行ってください。

特に下記項目の点検を実施してください。

- ① 外部の損傷の程度確認

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:フレア株式会社

*外国製造業者:Kiran Medical Systems

国 名:インド