

\*\*2014年8月(第3版)  
\*2013年8月(第2版)  
2010年12月(第1版)

届出番号13B3X10093001008

機械器具 11 放射線障害防護用器具  
放射線防護用掛布(38357000)  
一般医療機器

## CT 小児用シールド

### 【形状・構造及び原理等】

本品は薄い1枚の鉛またはタングステン、ビスマス、アンチモンとこれを覆う耐液体性の外部カバーで構成され、長方形サイズの布状の形態である。

### 【使用目的又は効果】

本品は、CT撮影時に伴う一次放射線や散乱放射線による不必要な被曝から小児患者の体の特定部分を保護します。

### 【使用方法等】

保護したい人体の一部を覆うように装着してください。

### 【使用上の注意】

- ①水等がかからない場所で使用すること。
- ②落下させたり、強い衝撃を与えたりすると変形・破損することがありますので丁寧に扱うこと。
- ③本品を廃棄する場合は産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

### \*\*【保管方法及び使用期間等】

保管方法

直射日光が当たる場所、強い紫外線が当たる場所、各種放射線が当たる場所、高温多湿やほこりの多い場所は避けて保管してください。

### 【保守、点検に係る事項】

使用者の保守、点検

使用者による日常及び定期点検を必ず行ってください。

特に下記項目の点検を実施してください。

- ① 外部の損傷の程度確認

### 【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:フレア株式会社

\*外国製造業者:Kiran Medical Systems  
国 名:インド