

**2021 年 7 月（第 4 版）
*2013 年 3 月（第 3 版）
2012 年 10 月（第 2 版）

届出番号 1 3 B 3 X 1 0 0 9 3 0 0 1 0 1 3

機械器具 11 放射線障害防護用器具
放射線防護用前掛(38355000)
一般医療機器

フレア防護エプロン ワンタッチ

【形状・構造及び原理等】

薄い 1 枚の鉛又は鉛と同等の材料を覆う耐液体性の外部カバーで構成された標準長の長さの衣類である。

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:フレア株式会社

【使用目的又は効果】

患者、術者、又は他の人員の体を放射線撮影時の放射線被曝から保護します。

*外国製造業者:Kiran Medical Systems

国 名:インド

**【使用方法等】

人体を覆うように装着し固定用器具で固定してください。

【使用上の注意】

- ① 水等がかからない場所で使用すること。
- ② 落下させたり、強い衝撃を与えたりすると変形・破損することがありますので丁寧に取り扱うこと。
- ③ 本品を廃棄する場合は産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【保管方法及び使用期間等】

保管方法

直射日光が当たる場所、強い紫外線が当たる場所、各種放射線が当たる場所、高温多湿やほこりの多い場所は避けて保管してください。

長期保管の際はハンガーにかけて保管してください。

【保守、点検に係る事項】

使用者の保守、点検

使用者による日常及び定期点検を必ず行ってください。

特に下記項目の点検を実施してください。

- ① 平面性
- ② 外部の損傷の程度確認