

機械器具 11 放射線障害防護用器具
放射線防護用カーテン（38375000）
一般医療機器

X線防護用カーテン

【形状・構造及び原理等】

本品は、診断や治療のための医科/歯科処置における不必要な放射線被曝から術者、又は他の人員を保護します。

本品は人と一次放射線源又は散乱放射線源との間に、X線を透過しにくい鉛と同等の物質で作られた薄いシートをロッド又はトラックから吊るし、放射線遮断・減衰バリアを設けます。

本体をつるす金属製のフレームと、防護用のシート本体で構成されま

サイズ：900mm×150mm～900mm×2000mm

【使用目的又は効果】

術者、又は他の人員を医療又は歯科における放射線被曝から保護します。

【使用方法等】

本品を患者テーブルの横に取り付けて使用します。

【使用上の注意】

【使用方法に関連する使用上の注意】

本品は、鋭利なものと接触して損傷しないように注意して使用してください。

【重要な基本的注意】

- ① 本品がX線診断装置や関連機器と衝突しないように注意してください。
- ② 落下させたり、強い衝撃を与えたりすると変形・破損することがありますので丁寧に取扱ってください。

【その他の注意】

本品を廃棄する場合は産業又は医療用廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【保管方法及び使用期間等】

保管方法
直射日光が当たる場所、強い紫外線が当たる場所、高温高湿やほこりの多い場所は避けて保管してください。

有効期間

有効期間は、使用上の注意を守り、正規の保守、点検を行った場合に限り納入後10年間です。
(自己認証、当社データによる。)

【保守、点検に係る事項】

使用者の保守、点検
使用者による日常及び定期点検を必ず行ってください。
特に下記項目の点検を実施してください。

- ① 外部の損傷の有無および程度の確認

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フレア株式会社

外国製造業者：MAVIG GmbH
国名：ドイツ