

機械器具 11 放射線障害防護用器具
放射線防護用生殖腺防護具(38367000)
一般医療機器

MAVIG 防護スカート

【形状・構造及び原理等】

薄い 1 枚の鉛又は鉛と同等の材料を覆う耐液体性の外部カバーで構成された下半身の長さの衣類である。

【使用目的又は効果】

患者、術者、又は他の人員の生殖器や下半身を放射線撮影時の放射線被曝から保護します。

【使用方法等】

人体の下半身を覆うように装着し固定用器具で固定する。

【使用上の注意】

- ① 水等がかからない場所で使用すること。
- ② 落下させたり、強い衝撃を与えたりすると変形・破損することがありますので丁寧に取り扱いすること。
- ③ 本品を廃棄する場合は産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【保管方法及び使用期間等】

本品を設置するときには次の事項に注意してください。

- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる場所は避け、ケースに入れて保管する。
- ・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- ・長期保管の際はハンガーにかけて保管してください。

【保守、点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- ・外観に傷やひび割れなどの異常が無いこと。

2. 業者による保守点検事項

- ・外観に傷やひび割れなどの異常が無いこと。

【製造販売業者および製造業者の名称等】

製造販売業者：フレア株式会社

外国製造業者：MAVIG GmbH

国 名：ドイツ