

2020年10月（第1版）

届出番号13B3X10093009002

医療用品（01） エックス線フィルム
ノンスクリーン型歯科画像診断用X線フィルム(40978000)
一般医療機器

Flair デンタルフィルム

【形状・構造及び原理等】

【形状】 本品は支持体に銀塩感光材料を塗布したものです。

【サイズ】 24～54mm×30～70mm

【原理】 フィルム乳剤中のハロゲン化銀にX線が照射されると、目に見えない像が形成されます。この目に見えない像を現像することにより、目に見える銀画像にする事ができ、この黒い銀画像が診断画像となります。

【使用目的又は効果】

特に歯科用X線装置で使用するためにサイズを定めて設計したノンスクリーン型X線フィルムです。

【品目仕様等】

ISO3665:1996 による

【使用方法等】

本フィルムを口腔内に挿入し、X線撮影を行った後現像処理を行う

【使用上の注意】

- 適切な安全光の下で開封すること。
- 開封後はなるべく早めに使用すること。又、遮光のため、内袋に入れたまま保管すること。
- 局部的に折り曲げたり、擦ったり、強い圧力をかけたりしないこと。
- フィルムが接着するような極度な高湿下での取扱いは避けること。
- 静電気が発生するような極度な低湿下での取扱いは避けること。
- 濡れた手による取扱いは避けること。
- 二重露光は避けること。
- 使用目的以外に使用しないこと。
- 長時間高温下での取り扱いは避けること。特にスポットライトやOHPを使用する場合には注意すること。

その他の注意事項

フィルムを廃棄する場合は、産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物廃棄業者に廃棄を依頼してください。

【保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法

ア) 未使用フィルムは直射日光を避けて、放射線やX線及び有害ガス（ホルマリンガス、硫化水素ガス等）の影響を受けない低温・低湿の場所に保管してください。推奨温度・湿度は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

イ) 現像後のフィルムは、薬品、溶剤などの付着により画質に影響を及ぼします。直射日光や高温になる室内、車内での長時間の放置は避けてください。

2. 有効期間

有効期間（使用期限）は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【製造販売業者および製造業者の名称等】

製造販売業者：フレア株式会社

外国製造業者：Agfa NV

国 名：ベルギー