


デンタルダムフレーム

【禁忌・禁止】

- この製品は真鍮を使用している。金属アレルギーの既往症のある患者に使用する際は十分な監視を行い、アレルギー症状が現れた場合はすぐに使用を中止し専門医の診察を受けさせること。
- 本品を漂白剤に浸さないこと。スチールウール及び金属製のブラシで本品を洗淨しないこと。破損の恐れがある。

【形状・構造及び原理等】


PP 製のものと金属製のものがある。各寸法は次のとおり。

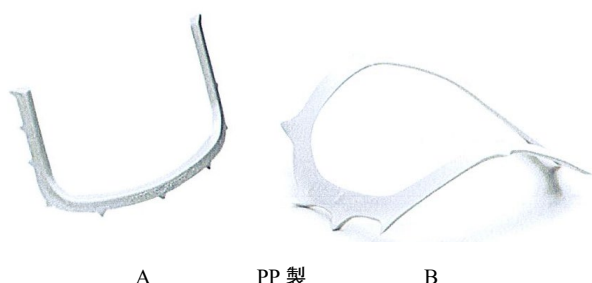

寸法

型番	内寸 mm (幅×高)	タイプ
H01414	114×79	A
H01416	98×98	A
H00560	112×107	B

主材料 PP

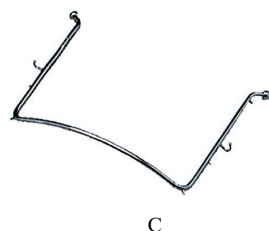

金属製

寸法

型番	外寸 mm (幅×高)	タイプ
H07082	116×95	C
H07083	129×105	C

主材料 真鍮

【使用目的又は効果】

延伸させたラバーダムを保持するために用いる。

【使用方法等】

- ラバーダムパンチ（販売名デンタルダムパンチ届出番号 13B1X1000128 推奨）を用いてラバーダム（販売名 ELASTI-DAM デンタルダム届出番号 13B1X10231000103 推奨）に穴をあける。
- 露出させた処置歯の歯頸部にラバーダムクランプ（販売名カラークランプ届出番号 13B1X10231000126 推奨）を用いてラバーダムを固定する。
- その後ラバーダムを本品の保持突起部に固定させたうえで歯牙の治療にあたる。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 本品に対してかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみなどの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 本品に対してかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみなどの過敏症状があらわれた患者には、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。
- 本品を使用前に必ず洗淨し、高圧蒸気滅菌器で滅菌すること。
- 使用後は温水で洗淨後、超音波洗淨器を使用して付着物を完全に取り除くこと。洗淨後は十分に乾燥させること。
- 高圧蒸気滅菌器を使用する際は121℃で20分行うこと。
- 本品は歯科用以外の用途には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け室温で保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	AJMD株式会社 電話番号：03-5614-0733
外国製造業者	Colte(')ne/Whaledent Inc., コルテン/ウエルデント インク (アメリカ合衆国)
販売業者	東京歯科産業株式会社 電話番号：03-3831-0176

写真は製品の例を示す。