

## \*カーバイドバー

### 【禁忌・禁止】

1. 歯科用ハンドピースを使用すること。それ以外の器具では使用しないこと。
2. ハンドピースに本品を挿入する場合、ハンドピースの奥底まで確実に挿入すること。
3. 器具を落下させないこと。又、強い衝撃を与えないこと。
4. 本製品は歯科有資格者以外は使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、軸部と頭部(作業部)から構成され、ハンドピースエンジン等に接続し、金属、プラスチック、陶材又は同種の材料を研削するために使用する。

軸部適用規格: JIS T 5504-1  $\varnothing$ 2.35mm、1.6mm

### 【使用目的又は効果】

タングステンカーバイト製の作業部を持ち、歯科用ハンドピース等に装着し、歯牙、骨等の硬組織を切削するために用いる回転式の研削器具。

### 【使用方法等】

歯科用ハンドピース等に装着して使用する。

推奨回転数は外箱の表示を参照のこと。

使用方法等の詳細は本添付文書にあわせてハンドピース等の取扱説明書を参照すること。

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

- 本品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄、滅菌すること。

#### 使用上の注意

- 誤飲の予防: 器具そのもの、破折片等の誤飲を防止するための措置を取ったうえで器具を使用すること。
- ハンドピースメーカーの指定に従って本品を確実に奥まで挿入すること。
- 装着後の注意: 装着後は本品先端部への軽微な接触でもハンドピース等の荷重が加わり、大きな曲げの力がバーに掛かるので装着後の取り扱いには十分に注意すること。
- 錆、損傷、変形(表面傷、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。

使用前に、あらかじめ患者の口腔外で回転させ振れの無いことを確認すること。

- 発熱により火傷する恐れがあるので、発熱を避けるために十分な注水下、フェザータッチで断続的に使用すること。頭部の細いもの、長い形状のものは、破折、変形することがあるため、無理な角度、加圧での使用は避けること。
- 使用時は目の損傷を防ぐために保護眼鏡等を使用すること。

洗浄、消毒、滅菌上の注意:

- ① 使用後は、器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去し、洗浄すること。本品は超音波洗浄器による洗浄が可能である。(洗浄時間 1 サイクル 5 分間推奨)

- ② オートクレーブ滅菌器を用いて滅菌を行う(132℃、12 分間推奨)。
- ③ 乾燥温度に注意すること(190℃、6 分間推奨)。高温の乾燥は、器具が変質又は変色することがある。
- ④ 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた用法、用量に従うこと。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
- ⑤ 塩素系の消毒液は使用しないこと。
- ⑥ 乾熱滅菌器は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 洗浄、消毒、滅菌後は水分を除去し、必ず乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
- 滅菌したものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管、管理をすること。
- 常温、常湿にて保管すること。
- 電気分解を要因とした発錆を防ぐため、材質の異なる器具と一緒に保管しないこと。
- 「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- 化学薬品と一緒に保管しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	AJMD 株式会社 電話番号: 03-5614-0733
製造業者 国名	コルテン/ウェルデント社 スイス
**製造業者 国名	Coltene/Whaledent Inc., (コルテン/ウェルデント社) アメリカ
販売業者	コルテンジャパン合同会社 電話番号: 042-595-6945