

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器 医療脱脂綿 JMDN コード 70975000

再使用禁止

## デンタルロール

**【禁忌・禁止】**

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

**【形状・構造及び原理等】****デンタルロール ルナ**

- 綿繊維等からなる筒状の繊維部で構成
- φ9mm－φ14mm×38mmの円柱形ロール

**デンタルコットンロール**

- 柔軟性、吸収性の優れた綿繊維等からなる筒状の繊維部で構成
- φ8mm－φ12mm×38mmの円柱形ロール

**デンタルロール ルナ・ゴールド**

- 綿繊維等からなる筒状の繊維部、繊維部を巻いて纏めてあるコート部、識別子の役割である識別ライン部（金色）で構成
- φ8mm－φ12mm×38mmの円柱形ロール

**パロティスロール**

- 綿繊維等からなる筒状の繊維部と、製品中央に設けられた製品の型崩れを防止するための軸部（緑色）で構成
- φ8mm－φ10mm×80mm－100mmの円柱形ロール

**コットンペレット**

- 柔軟性、吸収性に優れた綿繊維等からなる球状繊維
- φ3mm－φ7.6mm

**【原材料】**

脱脂綿、等

**【使用目的又は効果】**

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

**【使用方法等】**

- ① 可能なものは、留置前に適用部位に合わせて、予め形状を変形させます。（パロティスロール）
- ② 本品をピンセット等に挟器で挟んで保持します。
- ③ 口腔内の目的部位へ運び、留置します。
- ④ 終了後、再度本品をピンセット等の挟器で挟んで取り出し、廃棄します。

**【使用上の注意】**

- 本品の使用は一回限り、再使用はしないでください。
- 包装開封後、速やかに使用すること。
- 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】****【保管方法】**

- 水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

**【有効期間】**

- 本品は包装に記載の使用期限までに使用すること。  
[使用期限は、自己認証（自社データ）による]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】****製造販売業者**

AJMD 株式会社

電話番号: 03-5614-0733

**外国製造業者**

Colte(`)ne/Whaledent GmbH + Co.KG

コルテン/ウエルデント

(ドイツ)

取扱説明書を必ずご参照ください