

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯磨カップ JMDNコード (16184000)

プロフィーアングルカップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品を再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状

本品はカップの形状をしており、歯科用ハンドピース等に装着し、回転させ、研磨材と併用して歯面を清掃する。

仕様



ハードタイプ(ダークグリーン)

ソフトタイプ(アップルグリーン)

原材料

TPE(熱可塑性エラストマー)

(本品はラテックスを含まない)

【使用目的又は効果】

歯科予防(清掃)時に研磨材を適用するために用いる、通常、ゴム製の器具をいう。本品は歯科用ハンドピースに取り付けて回転させて研磨材を歯に適用する。

【使用方法等】

- ・ 本品をパッケージから取り出す。
- ・ 歯科用ハンドピース等に装着し、研磨材を併用して回転させ、歯面を清掃する。
- ・ 歯面の状態に応じてハードタイプ、ソフトタイプを選び適用する。

【保管方法及び有効期間等】

保管条件:

直射日光、高温、高湿となる場所を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 AJMD 株式会社
電話番号:03-5614-0733

製造業者 Alfred Becht GmbH
(アルフレッド ベヒト GmbH 社)
国名:ドイツ