

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 JMDNコード (70904000)

Proxeo オーラ パウダー

【禁忌・禁止】

(適用対象患者)

- 呼吸器疾患患者[呼吸困難を引き起こす恐れがある]

(使用方法)

- 目に向かって噴射しないこと。[傷害を負う恐れがある]
- 補綴物、クラウン、ブリッジに噴射しないこと。[破損の恐れがある]
- 軟部組織、歯肉溝に噴射しないこと。[気腫等、出血の恐れがある]

温度: -10℃~+35℃

相対湿度: 10%~70%

有効期限:

包装に記載の使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 AJMD 株式会社
電話番号: 03-5614-0733

製造業者 Mectron S.p.A.
(メクトロン S.p.A.)
国名: イタリア

【形状・構造及び原理等】

形状



250g入り

本品は粉末状である。

原材料

ソフト: 炭酸水素ナトリウム、ミント香料

スムーズ: 炭酸カルシウム、硝酸アンモニウム、硝酸カルシウム、水、酸化鉄、リン酸モノアンモニウム

【使用目的又は効果】

歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

- 使用前にボトルを上下に軽く数回振る。
- 本品を電動型機器接続歯面清掃器具に補充する。
- 本品を歯面に吹き付け、清掃・研磨する。
- 清掃・研磨終了後は速やかにうがい等で口腔内を水洗いする。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

歯科医、歯科衛生士、患者にはゴーグルの着用を推奨する。(眼球外傷の恐れがある)

歯科医、歯科衛生士は、粉体の吸引を防ぐため、マスクを着用すること。

処置の間は患者の口唇をワセリン等で保護すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管条件:

高温多湿、熱源、酸の影響を受ける場所を避け、密閉容器に保管すること。