

歯科材料 03 義歯床材料
一般医療機器 歯科印象トレー用レジン JMDNコード (70832000)

再使用禁止

DWS 印象トレーレジン

【警告】

- ・皮膚への接触は皮膚感作を引き起こす可能性がある。
- ・目への接触は目の刺激を引き起こす可能性がある。
- ・歯科印象トレー以外の目的には使用しないこと。
- ・説明書の使用方法にしたがうこと。
- ・アレルギー反応が出た場合は直ちに使用を中断し、医師の診察を受けること。

【警告】

- ・本品は単回使用のため再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】



形状

1kg ボトル及び 165gチューブ
本品は液体状である。

原材料

メタクリレート樹脂

【使用目的又は効果】

液体の常温重合レジンであり、UV で二次硬化させることができる。個人トレー、ベースプレート等に用いる。

【使用方法等】

1. 使用前にボトルを約5分間振る。
2. 本品を3Dプリンターのタンクに入れる。
3. 3Dプリンターの使用方法に従い、造形物を製作する。
4. スクレーパーを使用して造形物を造形プラットフォームから取り外す。カッターを使用して、パーツに取り付けられているサポートを慎重に手で切断する。サポートを取り外す際、サポートの小さな破片が飛び散る場合があるため、皮膚と目を保護するため、保護眼鏡と手袋の着用を推奨する。
5. アルコール(エタノール、イソプロパノール濃度 95%以上)を使い、オートミキシングシステムまたは超音波デバイスで部品を3分間すすぐ。これにより、造形物外面から液体樹脂が除去される。
6. 部品を新しいアルコール(エタノール、イソプロパノール濃度が95%以上)で満たした別の容器に移し、2分間すすぐ。
7. 後硬化または後処理の前に、常に完全に乾かすこと。ファンや圧縮空気などを使用すると、部品がより早く乾燥できる。
8. UV硬化ユニットで造形物を二次硬化する。硬化時間 20分。必要に応じて表面をやすりまたはサンドペーパーで仕上げる。

【保管方法及び有効期間等】

保管条件:

常温(5°C~30°C)常湿、暗所保管。

有効期限:

包装に記載の使用期限までに使用すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 AJMD 株式会社
電話番号: 03-5614-0733

製造業者 DWS SRL
(ディーダブリューエス SRL)
国名: イタリア