

再使用禁止

SARSTEDT セーフティランセット

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・再使用禁止
- ・穿刺針の保護キャップに破損があるもの、キャップが外れているものは使用禁止 [感染のおそれがあるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品の種類は以下のとおりである。

ランセットタイプ	ホルダーカラー	針のサイズ	穿刺の深さ
Mini	ブルー	28G	1.6 mm
Normal	グリーン	21G	1.8 mm
Extra	イエロー	18G	1.8 mm
Super	パープル	1.5mm 幅刃	1.6 mm
Neonatal	ピンク	1.5mm 幅刃	1.2 mm



(図：代表例：Mini)

2. 原理

保護キャップを外し、穿刺ボタンを押すと、穿刺ボタンと連動したホルダー内部のスプリングの伸縮作用により、ホルダー内に格納された穿刺針が押し出され皮膚を穿刺し、穿刺後、穿刺針はホルダーに引き込まれる。

【使用目的又は効果】

血液検査のための微量採血を目的とする。
 滅菌済みで直ちに使用できる。

【使用方法等】

1. 保護キャップをねじって外す。
2. 洗浄した穿刺部位に本品を押し付け、穿刺ボタンを押す。
3. 穿刺部位を優しくマッサージして、必要な血液量を取得する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
2. 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。]

3. 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあります。

- ・脱水状態
- ・ショック状態
- ・末梢循環障害

4. 耳朶等、組織が薄い部位への穿刺を行なう場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないでください。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあります。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討してください。]

5. ご使用の前に包装が破損、汚損しているものがないかご確認ください。

6. ランセットは、保護キャップを外した際は、針先に異常がないかご確認ください。

7. 新生児又は1歳未満の乳児に使用する場合は、必ずかかとの左右側面の肉厚部分から採血してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管条件

直射日光、高温多湿を避けること。

2. 有効期間

製造より5年（自社データによる）

【包装】

200個／箱、1200(200個×6箱)／ケース

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者 AJMD 株式会社
 電話番号 03-5614-0733

外国製造業者 HTL-STREFA S.A.
 (ポーランド)

発売元 ザルスタット株式会社
 電話番号 03-3526-3530