

2016 年 5 月 16 日(新様式第 1 版)

2022 年 11 月 10 日(新様式第 2 版)

歯科材料 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯面研磨剤 JMDN70904000

ホワイトクールポリッシングパウダー

【警告】

- ① 本製品は歯科医師の指導の下に用いる医療機器である。
- ② 健全歯においても知覚過敏を併発する恐れがあるため、歯周患者または齲蝕治療の必要がある歯牙には使用しないこと。

【禁忌・禁止】

次の行為の禁止

- ① 健全でない歯
- ② 無カタルーゼ症
- ③ 妊娠中、授乳中の女性
- ④ 小児
- ⑤ 重度の歯周炎や歯肉炎

【形状・構造及び原理等】

主成分：酸化チタン、シリカ

性状：本材はマイクロパウダーでボトル 1 本について 4 g 封入されている。

付属品：混合ブラシ

【使用目的、効能又は効果】

使用目的

歯面の清掃及び研磨に用いる。

【品目使用等】

性能

本品は、酸化チタンとシリカの混合マイクロパウダーを主成分とするポリッシングパウダーである。

口腔内においては、光照射により酸化チタンが光触媒反応し、その光酸化反応により歯の表面の汚れ分解を行う。

【操作方法又は使用方法等】

使用方法

適用部位は健全歯のみであり、くさび状欠損を含む修復処置が必要でない歯面または処置が行われていない歯面であること。

以上が見られた場合は直ちに使用を中止する。

【使用上の注意】

1. 警告 【警告】の項に記載の通り。
2. 禁忌・禁止 【禁忌・禁止】の項に記載の通り。
3. 規定された使用目的のみに使用する。
4. 金属イオンによる着色及び先天的変色歯には十分な効果が得られないので慎重に使用する。
5. 本品使用前に、患者に対して本品の仕様の必要性について説明を行い、使用の可否を判断する。
6. 本品使用後には一時的に歯面の着色が改善されるが、恒久的でないことを十分に説明する。
7. 知覚過敏症を誘発した場合は直ちに使用を中止し経過を観察する。
8. 術前の審査を十分に行う。

【貯蔵・保管方法及び使用期間】

保管方法

高温を避け冷暗所にて保管

【取扱い上の注意】

直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところで密栓して保管する。

誤用を避け品質を保持するために他の容器に入れ替えない。

【包装】

本品は製品毎に 1 個単位包装。

ボトル 4 g×2 本

混合ブラシ 20 本

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者・製造業者

株式会社 MD T ジャパン

住所 〒730-0012

広島県広島市中区上八丁堀 5 番 25 号

TEL 082-502-6907

FAX 082-502-2520

MD Tech Corporation
Made in KOREA