

機械器具（36） 医療用ピンセット

一般医療機器 ピンセット JMDN コード：35079001

ピンセット

【禁忌・禁止】

1. 目的以外の使用禁止

本製品を以下の使用目的以外に使用しないで下さい。
目的以外での使用は思わぬ事故を招く恐れがあります。

2. 二次加工の禁止

本製品に曲げ、切削等の二次的加工（改造）を行う事は折損、変形等を招く恐れがあります。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状：本品には、有鉤・無鉤及び超硬チップ付タイプがある。

（代表的写真）



2. 原材料：ステンレス鋼
（超硬チップ部：タングステンカーバイト）
3. 原理：手術及び処置の際、2 枚の刃が材料及び目的組織を挟みつかむ事が出来ます。

【使用目的又は効果】

本製品は、手術及び処置の際に、皮膚や組織等を保持するために使用する器具です。ハンドルは永久的に結合している。

【使用方法等】

本品は未滅菌の状態で供給される為、必ず適切な方法で滅菌してから使用すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
- 1) 本品は器具を保護する保守油が塗布されている為、適切な洗浄処理後に滅菌処理を行うこと。
 - 2) 本品をクロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）患者、またはその疑いがある患者に使用した場合は、CJD に関する国内規制及びガイドライン等を遵守すること。
 - 3) 使用後は、付着している血液、体液、組織等の汚物を除去し洗浄してください。
 - 4) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるためできるだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。
 - 5) 電気メスをを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器械の表面を損傷するので、併用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

滅菌後の保管は、再汚染を防ぐため清潔且つ適切な場所に

保管してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・消毒・滅菌
- 1) 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
 - 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
 - 3) 超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクター等で洗浄する場合はバスケット等に収納して処理する。
 - 4) 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
仕上げすすぎには、精製水等を用いることを推奨する。
 - 5) 洗浄後は、腐食防止のため直ちに乾燥すること。
 - 6) 可動部分の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布することを推奨する。
 - 7) 使用（滅菌）前に、汚れ・損傷・可動部の動き等を点検すること。
 - 8) アルカリ及び酸性洗剤は、アルミニウムを腐食させるおそれがあるので、中性洗剤を推奨する。
 - 9) 高压蒸気滅菌は下記の条件を推奨する。
115℃/30 分 121℃/15～20 分 126℃/10～15 分
（滅菌に関する詳細は、滅菌器の取扱説明書に従ってください。）

【参考文献】

機械の正しいメンテナンス法 第 8 版 2004

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者

ME F サージテック株式会社

TEL：04-7159-1990 FAX：04-7179-5202