

類別及び一般的名称 等			届出番号
理学診療用器具	弾性ストッキング 31724000	一般医療機器	18B3X10028000006
販売名			
医療用着圧ソックス SL			

製品特徴(原理)

本品は、伸縮性により着用部に同心性の圧迫を加えるとともに、末梢部から中枢に向かい圧迫圧が漸減する構造となっております。

形状

ハイソックス

品質表示(構造)

ナイロン
ポリエステル
ポリウレタン
綿
アクリル

使用目的、効果又は効能

本品は、下肢の静脈血のうっ滞を軽減又は、予防する等、静脈還流の促進を目的とした医療用の弾性ストッキングです。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能があります。

使用方法

- 1.準備 足首とふくらはぎの周囲径を計測し、正しいサイズをお選びください。
- 2.着用方法 着用する際は、爪や指先の荒れ、指輪等で本品を傷つけないようご注意ください。

- ①本品をたぐりよせて、つま先を入れます。
- ②足首まで引き上げてかかとの位置をあわせませす。
- ③両手の親指を内側に入れ、均等に少しずつソックスをひざ下まで引き上げます。

使用上の注意

本品の着用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚やつめの変色、皮膚温の低下、かゆみ発疹、かぶれ等の異常およびその他着用前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに着用を中止してください。(動脈・静脈の血行障害又は神経障害等を発症する恐れがあるため。)

1. 切り傷、打ち身、捻挫その他による出血時は使用しないでください。
2. 骨折、やけど。筋肉の組織破壊などに対しては使用しないでください。
3. 肌に異常がある場合は使用しないでください。(症状が悪化する恐れがあります)
4. 次の人は医師と相談の上、ご使用ください。
 - ①高血圧、心臓、肝臓などに障害のある方。
 - ②妊婦など安静を必要とする方。
 - ③糖尿病などによる高度の末梢循環障害のある方。
5. 就寝時の使用は避けてください。

取扱注意

繊維の劣化により適正な圧迫圧が得られなくなるため、滅菌は行わないでください。

【洗濯方法】

1. 液温は30℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗いとし、直射日光を避け陰干しをすること。
2. 繊維の劣化を避けるために、高温、塩素系漂白剤、消毒剤、乾燥機、アイロンの使用、ならびにドライクリーニングは行わないこと。
3. 濃色の製品は色落ちする恐れがあるため、白物および淡色の物と分けて洗濯してください。

包装

1足(2枚)入/個

【製造販売業者】株式会社エル・ローズ
〒910-0033 福井県福井市三郎丸4-200
【製造業者】三ツ星靴下株式会社 高田工場
〒635-0076 奈良県大和高田市大谷313番地
販売名:医療用着圧ソックス SL
圧迫レベル:足 首 20hpa
ふくらはぎ 18hpa
製造販売届出番号:18B3X10028000006
類別及び一般的名称 等:
理学診療用器具 弾性ストッキング 31724000
一般医療機器