

類別及び一般的名称等

機械器具 12 理学診療用器具 弾性ストッキング 31724000 一般医療機器

製造販売届出番号

18B3X1002800024

販売名

アシラクサポーター

【警告】

- 次の人は医師と相談の上、ご使用ください。
 - ① 高血圧、心臓、肝臓、腎臓等に障害のある方。
 - ② 妊婦等の安静を必要とする方。
 - ③ 糖尿病等による高度の末梢循環障害のある方。
 - ④ 現在、病気や怪我などによる脚のむくみやだるさを感じる方。
 - ⑤ 血行障害を起こしたことがある方。
- 就寝時の使用は避けてください。

【禁忌・禁止】

1. 切り傷、打ち身、捻挫その他による出血時は使用しないでください。
2. 骨折、やけど、筋肉の組織破壊等に対しては使用しないでください。
3. 肌に異常がある場合は使用しないでください。
(症状が悪化する恐れがあります)

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

ハイソックス

＜製品特徴・原理＞

本品は、伸縮性により着用部に同心性の圧迫を加えるとともに、末梢部から中枢に向かい圧迫圧が漸減する構造となっております。

【使用目的又は効果】

下肢の静脈血、リンパのうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的とした医療用の弾性ストッキングです。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能があります。

【使用方法等】

1. 準備
足首・脹脛の周囲径を計測し、正しいサイズをお選びください。

2. 着用方法

着用する際は、爪や指先の荒れ、指輪等で本品を傷つけないようご注意ください。

- ① 本品をたぐりよせて、つま先を入れます。
- ② 足首まで引き上げてかかとの位置をあわせませす。
- ③ 両手の親指を内側に入れ、均等に少しずつシワがよらないようにソックスをひざ下まで引き上げます。



【使用上の注意】

1. 本品の着用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚やつめの変色、皮膚温の低下、かゆみ発疹、かぶれ等の異常およびその他着用前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに着用を中止してください。
(動脈・静脈の血行障害又は神経障害等を発症する恐れがあるため。)
※「しゃがむ」等の姿勢をした時に衣服圧が高くなり、静脈血が停滞しやすくなる可能性がありますので、使い方には注意してください。
2. サイズが合わないものを使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

高温・多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

繊維の劣化により適正な圧迫圧が得られなくなるため、滅菌は行わないでください。

＜洗濯方法＞

1. 水温は30℃を限度とし、ネットを使用し洗濯機の弱水流又は弱い手洗いをし、直射日光を避け陰干しをすること。
2. 繊維の劣化を避けるために、高温、塩素系漂白剤、消毒剤、乾燥機、アイロンの使用、ならびにドライクリーニングは行わないこと。
3. 濃い色の製品は色落ちする恐れがあるため、白物および淡色の物と分けて洗濯してください。

【包装】


1足(2枚)入／個

＜圧迫レベル・構造＞

脹脛(ふくらはぎ) 18hPa

足首 20hPa

※圧迫圧は各部位における参考値です。

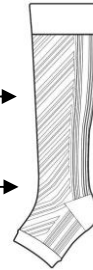

＜品質表示・構造＞

ナイロン
綿
ポリエステル
ポリウレタン

部位	S-M 周囲径	M-L 周囲径
脹脛(ふくらはぎ)	約30cm～37cm	約37cm～45cm
足首	約18cm～22cm	約22cm～25cm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社エル・ローズ
〒910-0033 福井県福井市三郎丸4-200
製造業者 三ツ星靴下株式会社 高田工場
〒635-0076 奈良県大和高田市大谷313番地
販売者 楽宝堂株式会社
〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町3番地26
お問合わせ先 0800-555-0111
販売名: アシラクサポーター
製造販売届出番号: 18B3X1002800024
類別及び一般的名称等: 機械器具 12 理学診療用器具
弾性ストッキング 31724000
一般医療機器