

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (JMDN コード : 70976000)

ニトリルグローブ パウダーフリー ブルー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本製品を複数の患者に対して再利用しないこと[汚染・感染のおそれがあるため]
- ・本製品を再利用しないこと[製品が破損や性能が変化するおそれがあるため]
- ・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

本製品は左右一対からなる合成ゴムを使用した検査・検診用手袋であり、術者が手に装着して使用するものである。

サイズ	S	M	L
型番	QMG30S	QMG300M	QMG30L
全長	240±10	240±10	240±10
手のひらの幅	80±10	95±10	110±10
中指の長さ	75±10	80±10	85±10

【使用目的又は効果】

本製品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成ゴム製の手袋である。

【使用方法等】

箱から手袋を取り出し、装着する。

【使用上の注意】

<使用注意>

- ・記載した目的にのみ使用すること。
- ・同じ手袋を複数の患者に使用しないこと。

<重要な注意事項>

- ・製品に含まれる化学物質により、アレルギー性接触皮膚炎の症状がでる恐れがあり、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
- ・製品本体の特性上、鋭利なものに接触すると損傷する恐れがあるため、使用前に損傷がないことを十分に確認し使用すること。

<相互作用>

- ・特殊な薬品の使用により、本製品が膨潤・浸透するおそれがあるため、状態を十分に確認の上、使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- ・蛍光灯下やオゾンを発生する器械、電子機器の周辺等に保管しないこと。

[有効期間]

- ・製造より 5 年間[自己認証による]
(使用期限は本品の包装に記載)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : FQ JAPAN 株式会社

所在地 : 東京都千代田区一番町 2 0 番地 3 プレミエール
番町 1 3 0 1 号

TEL/FAX : 03-6272-9108/03-3238-5756

製造業者 : 山東英科医療製品有限公司

(中華人民共和国)