

AQB・ABIインプラント株式会社

製造販売届出番号 11B1X10027060401

* 2021年7月（第2版）
2019年6月（初版）

器58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

AQBインプラントアナログ

再使用禁止

* 【禁忌、禁止】

- * ・当社AQBインプラントBタイプ（2ピースタイプ）及びAQBABIインプラントの手術以外に使用しないこと。[磨耗、破損の可能性があります]
- * ・再使用の禁止。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】


製造販売元
AQB・ABIインプラント株式会社

* 【形状・構造及び原理等】

1 原材料

チタン

* 2 構造

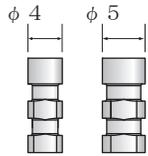

型番：φ4、φ5
使用するAQBインプラントBタイプ
(2ピースタイプ) 又はAQBABI
インプラントに合わせて選択

製造元

AQB・ABIインプラント株式会社

* 3 原理

AQBインプラントBタイプ（2ピースタイプ）及びAQBABIインプラントと同じ嵌合形態を有しています。外周部は回転防止、引き抜き防止用の突起を付与しており、作業模型内での固定を行います。

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料。

【使用方法等】

詳細な使用方法については「AQBインプラントシステム・2Pieceタイプ技工マニュアル」を参照してください。

1 AQBインプラント・マルチアバットメントをAQBインプラントアナログとスクリューで固定し、予め印象採得しておいた印象材内に内包されているAQBピックアップコーピングに戻します。

2 その後、石膏模型作成の通法に従い、歯科用石膏を用いて石膏模型を作製することにより、AQBインプラントアナログが石膏内に留まり、口腔内の状態を再現します。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1 本製品の使用に際し、使用前にAQBインプラント講習会に参加し、必要な知識と技術を修得して下さい。また、AQBインプラントの取扱説明書等を参照の上、正しい使い方により操作して下さい。

2 使用前に破損など使用に支障がないか確認して下さい。

3 AQBインプラントアナログは各種アバットメントに確実に装着、固定して使用して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管。

取扱説明書等を必ずご参照下さい。