

2021年8月1日（第2版）

歯 09 歯科用研削材及び研磨材
一般医療機器 歯面研磨材 JMDN コード：70904000

シルク

【禁忌・禁止】

[適用対象（患者）]

以下のような患者には使用前に歯科医師に相談すること。

- ・呼吸困難、喘息、鼻づまり、風邪などの花呼吸に係る疾患のある患者。
- ・心機能障害、肝機能障害のある患者。
- ・口腔内に口内炎、口腔粘膜炎等の疾患がある患者。
- ・口腔内に損傷（外傷、熱傷等）、炎症、腫瘍、充血、出血、びらん、まひ感がある患者。
- ・本品の成分に対して過敏症の既往症のある患者。

[使用方法]

- ・歯肉、歯周ポケット、粘膜などの口腔内軟組織に噴射しないこと。
- ・口腔内開創部に噴射しないこと。
- ・治療中は口腔内の余分な水分・パウダー等を吸引し、残留しないこと。

【形状・構造及び原理】

1. 形状

シルクパウダー：粉末

シルクペースト Pro：ペースト

シルククリーム：クリーム

種類	容量	成分
粉末	200g	生体活性ガラス、雪花石膏
ペースト	50g	生体活性ガラス、ラボナイト、グリセリン、カルシュームサプリメント、フェノニップ、レモンオイル、オレンジオイル、エマルゲン、二酸化チタン、キサントガム、FD&C 黄色色素
クリーム	1g,3g,5g,10g,20g,30g	生体活性ガラス、グリセリン、キサントガム

2. 原理

粉末：本品を圧縮空気、水とともに吹き付けることにより歯の表面を研削、研磨する。

ペースト、クリーム：研磨成分が歯の表面を清掃及び研磨する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる研磨材です。

【使用方法】

粉末：能動型機器接続歯面清掃用器具から供給される圧縮空気によって歯面に吹き付けることにより歯面の清掃及び研磨を行う。

ペースト、クリーム：予防治療ブラシ、歯磨カップ等を用いて、本品を歯面に擦り付けて清掃及び研磨を行います。

【使用上の注意】

- ・術者及び患者は保護メガネを着用すること。

粉末：・患者が本品を飲み込まないように、バキューム又は排唾管を併用すること。

- ・万一、本品が目に入った場合は直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

ペースト、クリーム：・本材の使用により、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた患者には使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・常温、常湿で保管すること
- ・蓋、キャップをしっかり占めて保管すること。
- ・直射日光の当たらない場所で保管すること。
- ・歯科の従事者以外触れないように適切に保管・管理すること。

2. 有効期間

包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

株式会社アパタイト

住所：〒162-0065 東京都新宿区住吉町1番23号
サンメゾン大谷 101号

電話：03-6380-4949

取扱説明書を必ずご参照ください。