

2021年9月6日（第1版）

歯 09 歯科用研削材及び研磨材
一般医療機器 歯面研磨材 JMDNコード：70904000

SYLC POLISH（シルクポリッシュ）

【禁忌・禁止】

[適用対象（患者）]

以下のような患者には使用前に歯科医師に相談すること。

- ・呼吸困難、喘息、鼻づまり、風邪などの花呼吸に係る疾患のある患者。
- ・心機能障害、肝機能障害のある患者。
- ・口腔内に口内炎、口腔粘膜炎等の疾患がある患者。
- ・口腔内に損傷（外傷、熱傷等）、炎症、腫瘍、充血、出血、びらん、まひ感がある患者。
- ・本品の成分に対して過敏症の既往症のある患者。

[使用方法]

- ・歯肉、歯周ポケット、粘膜などの口腔内軟組織に噴射しないこと。
- ・口腔内開創部に噴射しないこと。
- ・治療中は口腔内の余分な水分・パウダー等を吸引し、残留しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・常温、常湿で保管すること
- ・蓋、キャップをしっかり占めて保管すること。
- ・直射日光の当たらない場所で保管すること。
- ・歯科の従事者以外触れないように適切に保管・管理すること。

2. 有効期間

包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

株式会社アパタイト

住所：〒162-0065 東京都新宿区住吉町1番23号
サンメゾン大谷101号

電話：03-6380-4949

【形状・構造及び原理】

1. 形状

ペースト

種類	容量	成分
ペースト	50g	生体活性ガラス、ラボナイト、グリセリン、カルシウムサブリンメント、フェノニップ、レモンオイル、オレンジオイル、エマルゲン、二酸化チタン、キサントガム、FD&C 黄色色素

2. 原理

研磨成分が歯の表面を清掃する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃に用いる研磨材です。

【使用方法】

予防治療ブラシ、歯磨カップ等を用いて、本品を歯面に擦り付けて清掃及び研磨を行います。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

- ・術者及び患者は保護メガネを着用すること。
- ・本材の使用により、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた患者には使用を中止すること。