

2023年2月22日（第1版）

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN コード：70901000

酸化アルミナ 110 μ m

【形状・構造及び原理】

- 形状：粉末
- 原理
研磨成分が陶材、金属材、レジン剤などを研磨する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科技工士等が歯面の清掃に用いる研磨材です。

【使用方法】

コンプレッサーより供給された圧縮空気により 110 μ m の酸化アルミニウムパウダーを空気とともに噴射し陶材、金属材、レジン剤などを研磨する。

【使用上の注意】

- 術者は保護メガネを着用すること。
- 本材の使用により、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた場合には使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
 - 室温、湿気の無い場所で保管すること。
 - 蓋、キャップをしっかり占めて保管すること。
 - 直射日光の当たらない場所で保管すること。
 - 歯科の従事者以外触れないように適切に保管・管理すること。
- 有効期間
包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：

株式会社アパタイト

住所：〒162-0065 東京都新宿区住吉町1番23号

サンメゾン大谷 101号

電話：03-6380-4949

製造業者：

メディバンス インストルメンツ株式会社

英国

取扱説明書を必ずご参照ください。