


【コグニト褥瘡予測システム 3.0A】

【禁忌・禁止】

- ・電気毛布などの温度が 45℃を超えるものは使用しないでください。
- ・損傷したセンサーケーブルは使用しないでください。損傷したセンサーケーブルが見つかった場合は、販売店に連絡してください。
- ・安全リスクを避けるために、コントロールボックスを患者の頭のすぐ近くには設置しないでください。
- ・コントロールボックスやセンサーパッドを開けたり、改造したりしないでください。システムが正常に動作しない場合は、販売店に連絡してください。
- ・本製品を、電源を簡単に切ることができない場所に設置しないでください。
- ・必要でない限り、クイックリリースコネクタを抜き差ししないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

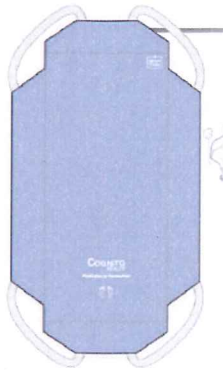

【使用目的又は効果】

本製品は、体動を検出するために用いるセンサ機器です。褥瘡（床ずれ）発症や睡眠障害（不眠症、いびき、睡眠時無呼吸等）のリスク検知に用います。

【使用方法等】

1. センサーパッドをマットレスの上に置きます。センサーケーブルが患者の頭側にあり、製品ロゴが足側にあることを確認してください。
2. コントロールボックスをベッドの右上または左上に配置します。
3. パッド上部の固定バンドをマットレスに固定し、パッド下部の伸縮バンドを引っ張りマットレスに装着します。
4. センサーパッドの側面をマットレスの下に折り込み、センサーパッドを平らにします。その後、センサーパッドをベッドシートで覆います。
5. センサーケーブルをコントロールボックスに接続します。
6. 正確な検出を行うために、ケーブルの向きを設定し、製品の使用を開始します。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 本製品を開封後、外部に損傷がないことを確認してください。
2. センサーケーブルを強く引っ張らないでください。
3. センサーポートにはセンサーケーブル以外のものを接続しないでください。

〈その他の注意〉

1. 本製品は、5℃から 40℃の範囲内の周囲温度と、湿度が 15%から 90%の範囲内で使用してください。
2. クイックリリースコネクタが誤って抜けた場合は、コネクタにある矢印のマークを確認し、その矢印の方向に従って差し込んでください。

【保管方法及び有効期間等】

製品や付属品が損傷しないよう、清掃・消毒、定期点検、またはベッドを移動する際には、センサーケーブルと電源アダプターを取り外してください。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項(日常点検)〉

- ・保守点検は故障や事故を未然に防ぎ、安全性・有効性を維持するため必要な作業です。年に 1 度の定期点検を行ってください。

〈洗浄・滅菌の方法〉

- ・センサーパッドを清潔で柔らかい布で拭いてください。布は、5000ppm 未満の漂白剤、75%エタノール、または 3.1%過酸化水素で湿らせることを推奨します。

〈洗浄・滅菌上の注意〉

- ・センサーパッドに残留物が残っていないことを確認してください。
- ・使用する前に、センサーパッドを完全に乾燥させてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社エクセルエンジニアリング

〒101-0052

住所：東京都千代田区神田小川町 2-12-14

晴花ビル 9 階

TEL 03-5280-7120

FAX 03-5280-7123

〔製造業者〕

コグニトヘルス Cognito Health Inc.（台湾）