

Fineニトリルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は合成ゴム（ニトリルゴム）を主材料とし、副材料に打粉を含まない（パウダーフリー）、未滅菌の使い捨て形式の検査・検診用手袋である。

表面仕上げは粗面と平滑がある。

【使用目的又は効果】

本品は手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して装着し使用する。

【使用上の注意】

1. 使用注意：

患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹等が発生することがあるので、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止する。必要に応じて、医師に相談し適切な処置を行うこと。

2. 重要な基本的注意：

- 1) 万一、製品に破損や汚損がある場合や、ピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
- 2) 使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切に処分すること。
- 3) 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開いたりすることがあるので注意すること。
- 4) 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合がありますので、確認し使用すること。

3. その他の注意：

使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

・蛍光灯下やオゾンを発生する器械、電子機器の周辺等に保管しないこと。源、X線、高温多湿を避けて保管すること。

・有効期間：製造年月より5年〔自己認証による〕
（使用期限は本品の包装に記載）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：NCY株式会社

福岡県福岡市東区多の津1-11-13

製造業者：

Zhonghong Pulin Medical Products Co.,Ltd.（中国）

Blue Sail Medical Co.,Ltd.（中国）

Shandong Intco Medical Products Co.,Ltd.（中国）