

Fineプラスチックグローブ

再使用禁止

- 【禁忌・禁止】

 - ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・左右同一型（平手タイプ）
- ・パウダーフリー
- ・非滅菌
- ・主原料：塩化ビニル樹脂（非フタル酸系可塑剤使用）
- ・表面仕上げ：平滑

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材性の手袋をいう。歯科用手袋を除く。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して装着し使用する。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - ・体質・使用状況によりかゆみ、かぶれ等の遅延性のアレルギー性症状
（IV 型－遅延型：主に添加剤等の化学物質による）を引き起こすことがある。装着後数時間後から症状が発現することがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
2. 重要な基本的注意
 - ・複数の患者には使用しないこと。
 - ・使用中に破損やピンホールなどの異常が認められた場合は新しい製品に交換する。
3. 相互作用
 - ・薬品、溶剤等によっては、膨潤したり、浸透したりする場合がありますので、確認の上、使用する。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - ・水ぬれに注意し、直射日光やオゾン、高温、多湿を避けて保管する。
2. 使用の期限
 - ・使用期限は包装に記載。
[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： NCY株式会社
福岡県福岡市東区多の津1-11-13

製造業者：
Zhonghong Pulin Medical Products Co.,Ltd.（中国）
Blue Sail Medical Co.,Ltd.（中国）
Shandong Intco Medical Products Co.,Ltd.（中国）