


機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000（JMDNコード）
コネクティングチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止**【形状、構造及び原理等】**

1. 外観形状・構造

プラスチック製のチューブとチューブ両端のコネクタで構成されます。
コネクタは3種類あります。

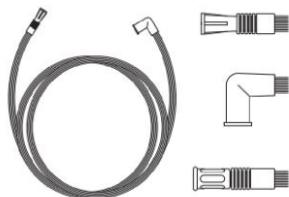

2. 原理

吸引器、回収容器、吸引嘴管等に接続することによって吸引します。

【使用目的又は効果】

本製品は、浸出液等を吸引により除去する際に、吸引器と回収容器又は排液用チューブと回収容器との接続に用いるプラスチック製のチューブです。

【使用方法等】

- 1) 本製品は吸引ヘッドまたは吸引器と接続して使用する必要があります。
- 2) ご使用の際は、パッケージを開封し、接続チューブを取り出し、接続チューブのコネクタと吸引器または吸引ヘッドを接続してご使用ください。
コネクタとの接続は脱落しないようにしっかりと締め、交差感染を起こして患者の治療に影響を与えないように注意してください。
- 3) 使用後は病院の規定と環境保護要求に従って廃棄してください。

【使用上の注意】

1. 本製品は再使用禁止あり、感染を防止するため、複数人で使用することは厳禁であり、使用後は破棄してください。
2. 包装が破損していたり、包装内に異物や汚れがある場合は使用しないでください。
3. 開封・密封の位置で開封し、汚染を避けるため開封後すぐに使用してください。
4. 使用前は製品名、型式、仕様は包装、合格证、製造日、製造番号、有効期限を十分に確認してください。
5. 製品は、相対湿度が80%を超えない、腐食性ガス、涼しい、乾燥した、換気の良い、清潔な環境で保存する必要があります。
内部では、高温貯蔵を避けるため、製品は厳密に袋に穴を開けることを防ぐために圧力を積み重ねることは禁止されています。
6. 接続チューブを使用する過程で折り畳まれてはならない。
7. ある程度の練り込み(黒い点)は発生するが、性能上影響はありません。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・直射日光、水ぬれ、高温・多湿の環境を避けて保管するしてください。
- ・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等を避けて安定した状態で保管してください。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管してください。

2. 有効期間

- ・包装に表示している使用期限欄を参照してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前後の点検を励行し、異常が認められたときには、メーカーに点検依頼をしてください。
2. 使用後は、部品を消毒・乾燥し、ちりやほこりが入らないように清潔に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：L & L ジャパン株式会社

住所：福岡県福岡市博多区銀天町1丁目6番20号

製造業者：ZHEJIANG MEDIUNION HEALTHCARE GROUP CO., LTD.

製造国：中華人民共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。