

インプロスカー スティック 50

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止


＜適用禁忌＞

- ・眼及び粘膜に触れさせないこと。〔予期せぬ副作用が起こるおそれがある〕
- ・傷口等損傷皮膚に使用しないこと〔予期せぬ副作用が起こるおそれがある〕

【形状、構造及び原理】

1. 形状／構造

〔外観〕

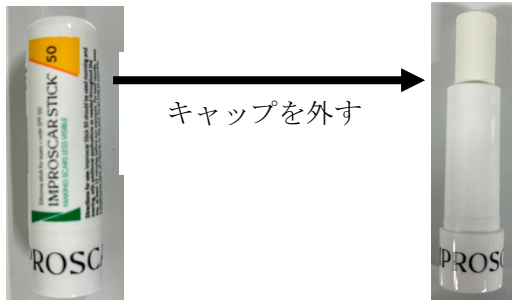

2. 材質

シリコーンジェル（被覆・保護材，紫外線カット剤含有）
ポリスチレン／スチレンアクリロニトリル（外装）

3. 原理

シリコーンジェルを患者の術後創傷の部分に塗布することで、術後創傷を保護する。本品は、シリコーンジェルに含まれる添加剤により、紫外線をカットする。

【使用目的又は効果】

本品は、術後創傷を保護するために用いる。

【使用方法】

1. 使用前の準備

- 1) 外箱からスティックを取り出す。
- 2) 患者体表の貼付面を清浄する。
- 3) スティックのキャップを取り外す。

2. 使用中の操作

露出したシリコーンジェルを患者の貼付面に塗布する。

3. 使用後の処置

スティックにキャップを戻し、スティックを外箱に入れ、保管する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- (2) 発疹等が生じた場合は直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- (3) 6 歳以下の子供に使用する場合は、医師に相談すること。

2. 不具合・有害事象

- (1) 発疹

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：直射日光を避け 10℃～30℃で保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：SUL 株式会社
住所：〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場 4-7-15
TAG 南船場 6 階
連絡先（TEL）：06-4708-4044
製造国名：スウェーデン
製造業者名：Wasserman Medic AB