

インプロスカー スティック 50 コンシール

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

＜適用禁忌＞

- ・眼及び粘膜に触れさせないこと。〔予期せぬ副作用が起こるおそれがある〕
- ・傷口等損傷皮膚に使用しないこと〔予期せぬ副作用が起こるおそれがある〕

【保管方法及び有効期間等】


保管方法：直射日光を避け 10℃～30℃で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：SUL 株式会社
住所：〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場 4-7-15
TAG 南船場 6 階
連絡先（TEL）：06-4708-4044
製造国名：スウェーデン
製造業者名：Wasserman Medic AB

【形状、構造及び原理】

1. 形状／構造
〔外観〕

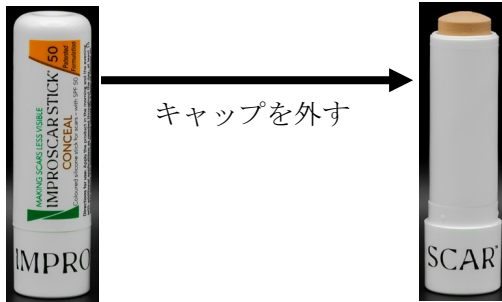

2. 材質

シリコーンジェル（被覆・保護材，紫外線カット剤，酸化鉄系色素含有）
ポリスチレン／スチレンアクリロニトリル（外装）

3. 原理

シリコーンジェルを患者の術後創傷の部分に塗布することで，術後創傷を保護する．本品は，シリコーンジェルに含まれる添加剤により，紫外線をカットする．

【使用目的又は効果】

本品は，術後創傷を保護するために用いる．

【使用方法】

1. 使用前の準備

- 1) 外箱からスティックを取り出す．
- 2) 患者体表の貼付面を清浄する．
- 3) スティックのキャップを取り外す．

2. 使用中の操作

露出したシリコーンジェルを患者の貼付面に塗布する．

3. 使用後の処置

スティックにキャップを戻し，スティックを外箱に入れ，保管する．

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状が現れた場合には，使用を中止し，適切な処置を行うこと．
- (2) 発疹等が生じた場合は直ちに使用を中止し，適切な処置を行うこと．
- (3) 6 歳以下の子供に使用する場合は，医師に相談すること．

2. 不具合・有害事象

- (1) 発疹