

異なった型、容量、寸法の注射筒を使用しないこと。[投与量が不正確になるおそれがある。]

- 10) 印字の目盛をこすらないこと。[目盛が消える可能性がある。]
- 11) 小児の手の届かないところに保管すること。
- 12) 使用済みの注射針の廃棄については、感染防止に留意し、以下の方法に従うこと。
 - (1) かかりつけの医療機関や薬局などから廃棄方法についての指示があった場合はそれに従うこと。
 - (2) 薬局などが自主的に回収を行っている地域においては、薬局などに廃棄方法を確認すること。
 - (3) 上記のような廃棄方法の指定がない場合は、市区町村の規則に従い廃棄すること。
 - (4) 手袋をするなど十分な注意をして、取り扱うこと。
 - (5) 使用后、本品をしっかりフタのできる固い容器に入れること。それをさらに袋に入れ、廃棄すること。
 - (6) 公共の場所（ホテル、公衆トイレ、飲食店等）には絶対に廃棄しないこと。
 - (7) ビン・缶などリサイクルに回る危険がある容器に入れて廃棄しないこと。

〈発生するおそれのある有害事象〉

針を刺した部位からの出血、針を刺した部位の痛み、赤み、はれあ
るいは内出血、金属アレルギー

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

〈有効期間〉

使用期限は内袋、化粧箱に記載。[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

エムベクタ合同会社

TEL：0120-106-893（カスタマーサービス）

外国製造業者：

*embecta Medical II LLC

国名：アメリカ合衆国