


機械器具 01 手術台及び治療台
 一般医療機器 手術台アクセサリ JMDN コード：70469000
メイフィールド・座位用クロスバー

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

<セット>

メイフィールド・座位用クロスバー

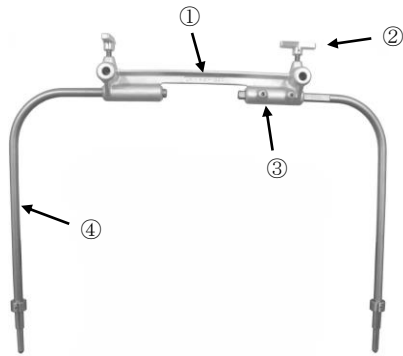

<セット構成品>

①クロスバー [1 個]



②トルクスクリュー [2 個]



③セットスクリュー [4 個]



④ポスト [2 本]



<オプション品>

ユニバーサルサイドレールクランプ [2 個]



2. 構造及び原理

本品は、メイフィールド・ベースユニット（ミズホタイプ、別売品）を手術台に固定させるために、手術台両端のサイドレールにユニバーサルサイドレールクランプを介して取り付ける。本品のセットスクリューをメイフィールド・ベースユニットに附属されているアジャストメントレンチを用いて締め込み、ポストの位置固定を行なう。またトルクスクリューの操作により、ベースユニット取付口に挿入したベースロッドを締め込み、メイフィールド・ベースユニットを確実に固定することを可能にする。

3. 原材料

アルミニウム合金
 ステンレス

4. 寸法等

外装に記載

【使用目的又は効果】

本品は、脳神経外科手術時に、頭部の保持・固定に使用されるメイフィールド・ベースユニット（ミズホタイプ）（別売品）と手術台の間に取り付け、座位での頭部固定の際に用いる。

【使用方法等】

使用方法の詳細については、取扱説明書を参照すること。

1. 組立て

①クロスバーにポスト（2 本）を外側より挿入する。

②メイフィールド・ベースユニット（ミズホタイプ、別売品）附属のアジャストメントレンチでポストが抜け落ちない程度にセットスクリューを締める（仮締め状態）。

2. 手術台への取り付け

①手術台両端のサイドレールに、サイドレールクランプを取り付ける。

②サイドレールクランプに、手順 1 で組み立てた本品ポストの幅を調整して取付ける。

③メイフィールド・ベースユニット（ミズホタイプ）の付属品であるアジャストメントレンチによりセットスクリューを締め込む（本締め状態）。


④位置や角度を調節し、ユニバーサルサイドレールクランプのノブを締めて固定する。

3. メイフィールド・ベースユニット（ミズホタイプ）の取り付け

①ベースユニット（ミズホタイプ）のベースロッドを本品（クロスバー）のベースユニット取付口に挿入する。

②トルクスクリューを締めてベースユニットを固定する。

完成図

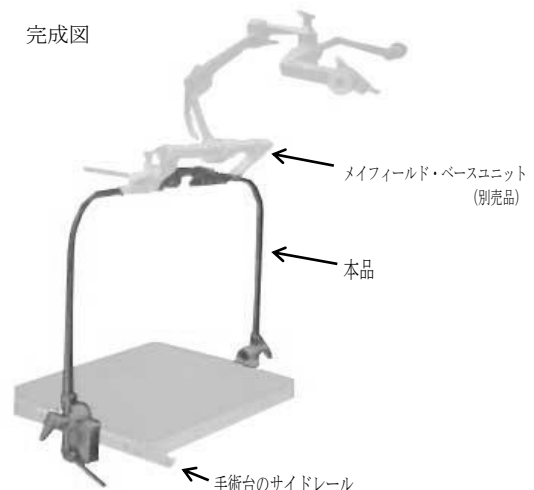

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品と手術台、本品の各構成品が確実に接続・固定されていることを確認すること。[落下事故防止のため]
2. クロイツフェルト・ヤコブ病（プリオン病）及び類縁疾患と診断された患者、あるいはその疑いのある患者に使用した場合は、国内規制及びガイドライン等を遵守すること。

【保管方法及び有効期間等】

構成品を紛失しない様に注意し、ケース等を用いて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後の点検
外観、機構等、異常がないことを確認すること。
2. 故障時のお願い
異常のあるもの及びその疑いのあるものは使用を中止し、下記の問い合わせ先に連絡するか、新しい物と取り替えること。
3. 洗浄方法
 - ①使用後は速やかに中性洗剤で洗浄(手洗い)又は消毒用エタノール等で清拭し、付着物を取除くこと。
 - ②機械による洗浄（ウォッシャーディスインフェクターの類）及び水中に浸け置きはしないこと。
 - ③苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗浄剤や、その他のアルカリ性、酸性の洗浄剤は腐食の原因となるため使用しないこと。
 - ④中性洗剤であってもアルミニウムには使用できないタイプがあるため、事前に洗浄剤の説明書にて使用の可否を必ず確認すること。
 - ⑤金属たわし、磨き粉（クレンザー等）の類は使用しないこと。
 - ⑥脱イオン水又は脱塩素水で十分すすぎ、乾燥させること。
 - ⑦乾燥器の類は使用しないこと。
 - ⑧本品は滅菌の必要はない。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

欧和通商株式会社：TEL 03（5803）7172

＜製造業者＞

日本語名：インテグラ・ライフサイエンス社（アメリカ合衆国）

英 名：Integra LifeSciences Corporation（U.S.A）

＜問い合わせ先＞

欧和通商株式会社 札幌営業所：TEL 011（708）7725

東京営業所：TEL 03（3813）8201

大阪営業所：TEL 06（6304）9305

福岡営業所：TEL 092（526）3618

住所等につきましては下記ホームページにてご確認願います。

ホームページアドレス <http://www.ohwa-tsusho.com>