



**2023 年 09 月 (第 6 版)

届出番号: 13B1X00167000145

*2022 年 01 月 (第 5 版)

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDN コード: 70469000

シーラー・手術台アクセサリ

【警告】

<使用方法>

- ①患者を長時間にわたって同一の体位に保つことや、皮膚に過度な圧迫がかかることは避けること。[神経麻痺や褥瘡等の原因となる場合があるため]
- ②正しく患者の位置を決めて、継続的な観察を維持すること。[間違った患者のポジショニングにより生命機能が害される場合があるため]

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状

番号	品番	品名 原材料 取付方法
①	90310	S R クランプ (Type-A・回転型) ステンレス鋼、サーモプラスチック サイドレールを介する
②	90312	S R クランプ (Type-B) ステンレス鋼、サーモプラスチック サイドレールを介する
③	90314	S R クランプ (Type-C) ステンレス鋼、サーモプラスチック サイドレールを介する
④	90506	S R クランプ (Type-D・回転型) ステンレス鋼、サーモプラスチック サイドレールを介する
⑤	90538	S R クランプ (Type-E) ステンレス鋼、サーモプラスチック サイドレールを介する
⑥	90539	S R クランプ (Type-F) ステンレス鋼、サーモプラスチック サイドレールを介する
⑦	90520	B J 上肢台 (ストラップ付) ステンレス鋼、サーモプラスチック、ポリエステル・フォーム サイドレールを介する
⑧	90521	上肢台 (ストラップ付) ステンレス鋼、サーモプラスチック、ポリエステル・フォーム サイドレールを介する
⑨	5.890- VE	アームレスト用ストラップ 合成皮革 サブアクセサリ
⑩	4646.0 5	アームレスト (ラテラル) ステンレス鋼、サーモプラスチック、ポリエステル・フォーム サイドレールを介する
⑪	4670.0 3	アームレスト (バーチカル) ステンレス鋼、サーモプラスチック、ポリエステル・フォーム サブアクセサリ (クランプ使用)
⑫	90321	麻酔枠 (Type-A) ステンレス鋼 サブアクセサリ (クランプ使用)
⑬	90323	麻酔枠 (Type-B) ステンレス鋼、サーモプラスチック サブアクセサリ (クランプ使用)
⑭	90559	麻酔枠 延長バー ステンレス鋼、サーモプラスチック サブアクセサリ (麻酔枠使用)

番号	品番	品名 原材料 取付方法
⑮	92021	手首ホルダー (Type-B) ステンレス鋼、サーモプラスチック、ポリエステル サイドレールを介する
	89067	手首用交換ストラップ (Type-B) ポリエステル サブアクセサリ (手首ホルダー使用)
⑯	92013	レッグ ストラップ (Type-A・Po) ポリエステル サブアクセサリ
⑰	90341	レッグ ストラップ (Type-B・Sy) 合成皮革 サブアクセサリ
⑱	90342	ボディ ストラップ (Type-A) 合成皮革、ステンレス鋼 サイドレールを介する
⑲	90334	肩用フレーム (パッド付) ステンレス鋼、サーモプラスチック、ポリエステル・フォーム サブアクセサリ (クランプ使用)
⑳	90335	体側支持フレーム (Type-A) / パッド付 ステンレス鋼 サイドレールを介する
㉑	90338	体側支持フレーム (Type-B) / パッド付 ステンレス鋼 サイドレールを介する
㉒	90350	体側支持用ポスト ステンレス鋼、サーモプラスチック サブアクセサリ (クランプ使用)
㉓	90351	体側支持フレーム (Type-C) / パッド付 ステンレス鋼、サーモプラスチック サブアクセサリ (体側支持用ポスト使用)
㉔	90352	体側支持ローラー ステンレス鋼、サーモプラスチック、ポリエステル・フォーム サブアクセサリ (体側支持用ポスト使用)
㉕	90325	アームレスト (パッド、ストラップ付) ステンレス鋼、サーモプラスチック サブアクセサリ (クランプ使用)
㉖	90166	アームレスト・パッド ポリエステル・フォーム サブアクセサリ
㉗	90326	大腿部固定器 (パッド付) ステンレス鋼、サーモプラスチック、ポリエステル・フォーム サブアクセサリ (クランプ使用)
㉘	90277	腹部支持器 (パッド付) ステンレス鋼、サーモプラスチック、ポリエステル・フォーム サブアクセサリ (クランプ使用)
㉙	81501	S R 簡易クランプ (25×10mm) 真鍮、サーモプラスチック サイドレールを介する
㉚	90079	膝支持器・フレーム (パッド付) ステンレス鋼、ポリエステル・フォーム サブアクセサリ (クランプ使用)

番号	品番	品名
		原材料
		取付方法
③①	5800 14	膝支持板用クランプ (サイドレール 25×10mm用)
		ステンレス鋼、サーモプラスチック
		サイドレールを介する
③②	9055 7	膝支持板 (パッド付)
		ポリエステル・フォーム
		サブアクセサリー (クランプ使用)
③③	9050 0	点滴スタンド
		ステンレス鋼、サーモプラスチック
		サイドレールを介する
③④	9033 2	器械台 (トレイ 520×330mm)
		ステンレス鋼、サーモプラスチック
		サイドレールを介する
③⑤	9035 5	ローチェアードホルダー
		ステンレス鋼、サーモプラスチック
		サブアクセサリー (クランプ使用)
③⑥	9035 6	ニーレスト (パッド付)
		モルトブレン・フォーム、ステンレス鋼
		サブアクセサリー (クランプ使用)
③⑦	8169 6	延長サイドレール (25×10mm用/全長 380mm)
		ステンレス鋼、サーモプラスチック
		サイドレールを介する
③⑧	9033 0	ゴベール支脚器 (パッド、ストラップ付)
		モルトブレン・フォーム、アルミニウム合金、ステンレス鋼、合成皮革
		サブアクセサリー (クランプ使用)
③⑨	9050 7	I n f i n i M a x 支脚器
		モルトブレン・フォーム、ステンレス鋼
		サブアクセサリー (クランプ使用)
③⑩	9050 9	レッグホルダー・クランプ (サイドレール 25×10mm用)
		ステンレス鋼、サーモプラスチック
		サイドレールを介する
④①	9050 3	延長板 (サイドレール 25×10mm)
		ステンレス鋼
		手術台へ直接
④②	9052 4	延長板・パッド
		ポリエステル・フォーム
		サブアクセサリー
④③	9037 0	ドルサルパッド
		モルトブレン・フォーム
		手術台へ直接
④④	9059 3	カーボン用サイドレール (25×10mm)
		アルミニウム合金、ステンレス鋼、サーモプラスチック
		サブアクセサリー (カーボン板使用)

③SRクランプ (Type-C)



④SRクランプ (Type-D・回転型)



⑤SRクランプ (Type-E)



⑥SRクランプ (Type-F)



⑦BJ上肢台 (ストラップ付)



⑧上肢台 (ストラップ付)



⑨アームレスト用ストラップ



⑩アームレスト (ラテラル)



⑪アームレスト (バーチカル)




⑫麻酔枱 (Type-A)



⑬麻酔枱 (Type-B)



⑭麻酔枱 延長バー


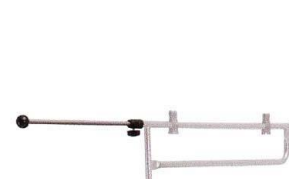



①SRクランプ (Type-A・回転型)



②SRクランプ (Type-B)

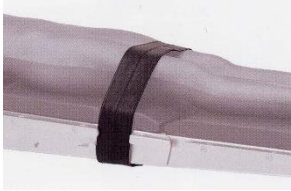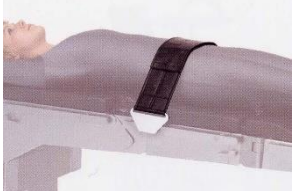

⑮手首ホルダー (Type-B) 	⑯レッグ ストラップ (Type-A・Po) 	⑰大腿部固定器 (パッド付) 	⑱腹部支持器 (パッド付) 
⑰レッグ ストラップ (Type-B・Sy) 	⑱ボディ ストラップ (Type-A) 	⑲SR簡易クランプ (25×10mm用) 	⑳膝支持器・フレーム (パッド付) 
⑲肩用フレーム (パッド付) 	㉑体側支持フレーム (Type-A) / パッド付 	㉑膝支持板用クランプ (サイドレール25×10mm用) 膝支持板 (パッド付) 	㉒点滴スタンド 
㉑体側支持フレーム (Type-B) / パッド付 	㉒体側支持用ポスト 	㉓器械台 (トレイ520×330mm) 	㉔ローチャードホルダー 
㉓体側支持フレーム (Type-C) / パッド付 	㉔体側支持ロール 	㉕ニーレスト (パッド付) 	㉖延長サイドレール (25×10mm用/全長380mm) 
㉕アームレスト (パッド、ストラップ付) 	㉖アームレスト・パッド 	㉗ゴーベル支脚器 (パッド、ストラップ付) 	㉘Infini Max支脚器 

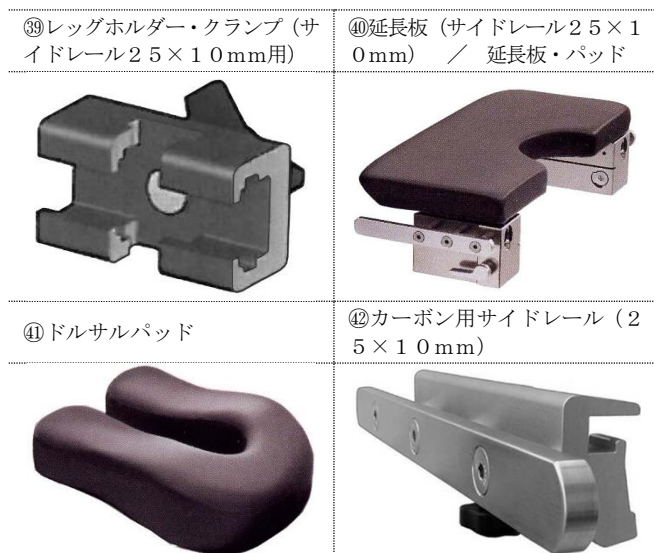

2. 構造及び原理

本品の各構成品をシーラー社製手術台（別売品）に接続することにより、手術時に必要な体位を得ることが出来る。各部はネジにより固定される。

3. 寸法等

外装に記載

【使用目的又は効果】

本品は、シーラー社製手術台（別売品）に接続するアクセサリである。

**【使用方法等】

必要に応じてシーラー社製手術台（別売品）に取付け、患者を支える。各アクセサリの取付方法は【形状・構造及び原理等】を参照。

**【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 使用前に本品と手術台、本品の各構成品が確実に接続・固定されていることを確認すること。[落下事故防止のため]
2. 手術台（別売品）に本品を接続した後、各アクセサリの上だけに乗ったり、座ったりしないこと。[手術台の横転、破損防止のため]
3. 操作中は各部位の隙間に手や指を入れないこと。[怪我防止のため]

【保管方法及び有効期間等】

ネジ等の部品の紛失に注意し、高温、高湿、直射日光を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

洗浄方法

- ① 使用後は速やかに中性洗剤で洗浄（手洗い）又は消毒用エタノール等で清拭し、付着物を取り除くこと。
- ② 機械による洗浄（ウォッシャーディスインフェクターの類）及び水中に浸け置きはしないこと。
- ③ 苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗浄剤は腐食の原因となり、材質の劣化を著しく早めるため使用しないこと。
- ④ 中性洗剤であってもアルミニウムには使用できないタイプがあるため、事前に洗浄剤の説明書にて使用の可否を必ず確認すること。

⑤ 金属たわし、磨き粉（クレンザー等）の類は使用しないこと。

⑥ 乾熱乾燥器の類は使用しないこと。

⑦ 本品は滅菌の必要はない。

※本品は度重なる洗浄及び使用による金属疲労により、破損する場合があります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

欧和通商株式会社：TEL 03 (5803) 7172

<製造業者>

日本語名：シーラー・メディカル社（スイス）

英 名：Schaerer Medical AG (Switzerland)

<問い合わせ先>

欧和通商株式会社 札幌営業所：TEL 011 (708) 7725

東京営業所：TEL 03 (3813) 8201

大阪営業所：TEL 06 (6304) 9305

福岡営業所：TEL 092 (526) 3618

住所等につきましては下記ホームページにてご確認ください。

ホームページアドレス <http://www.ohwa-tsusho.com>