

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDN コード：70469000
シーラー・ベースアダプター

【形状・構造及び原理等】


1. 形状

- ① arcus 用ベースアダプター
② AXIS 用ベースアダプター

上面図




正面図

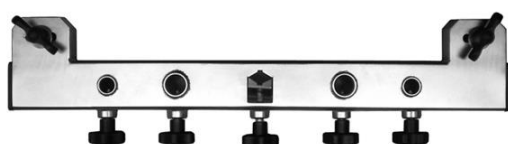

2. 構造及び原理

本品の手術台接続プラグが、手術台（別売品）のアクセサリ取付部の形状に合致しており、手術台側のロック機構により固定される。本品のベースユニット接続部のパイプが、ベースユニット（別売品）のロッドに合致しており、底面のベースノブにて固定する。

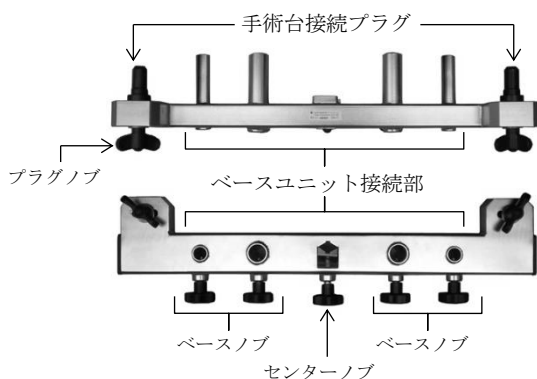

3. 原材料

ステンレス鋼、サモプラスチック

4. 寸法等

外装に記載

【使用目的又は効果】


本品は、arcus 手術台又は AXIS 手術台（共にスイス・シーラー社製、別売品）に、メイフィールド頭部固定装置のベースユニット（米国インテグラ社製、別売品）を連結させるアダプターとして使用する。

【使用方法等】

1. 本品の手術台接続プラグを手術台のアクセサリ取付部に挿入する。（プラグノブを緩めると挿入し易くなる。緩めたノブは手術台との接続後、確実に締めること。）

2. 手術台のアクセサリ固定レバーを操作して本品を固定する。
3. 本品のベースユニット接続部にベースユニットのロッドを挿入する。
4. ロッドを挿入した箇所のベースノブを操作してベースユニットを固定する。

<使用例>

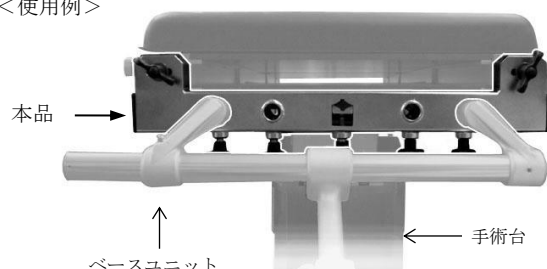

*【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 使用前に本品と手術台、本品とベースユニットが確実に接続・固定されていることを確認すること。[落下事故防止のため]
2. スイス・シーラー社製以外の手術台と組み合わせて使用しないこと。
3. インテグラ社製以外のベースユニットと組み合わせて使用しないこと。[作動不良、故障の原因となるため]

【保管方法及び有効期間等】

各ノブ及び手術台接続プラグの紛失に注意し、高温、高湿、直射日光を避けて保管すること。

**【保守・点検に係る事項】

洗浄方法

- ① 使用後は速やかに消毒用エタノール等で清拭し、付着物を取除くこと。
- ② 洗浄に際しては中性の洗浄剤を使用し、脱イオン水、脱塩素水にて十分すすぐこと。

※本品は度重なる洗浄及び使用による金属疲労により、破損する場合があります。

※本品は滅菌の必要はない。

洗浄に係る禁止事項

- ① 付着物等を取り除く際、シンナー、ベンジン等の溶剤は使用しないこと。
- ② 酸性、及びアルカリ性の洗浄剤は腐食の原因となるため、使用しないこと。
- ③ 薬液等が付着した状態で放置しないこと。
- ④ 金属たわし、磨き粉（クレンザー等）の類は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

欧和通商株式会社：TEL 03 (5803) 7172

＜製造業者＞

日本語名：シーラー・メディカル社（スイス）

英 名：Schaerer Medical AG (Switzerland)

＜問い合わせ先＞

欧和通商株式会社 札幌営業所：TEL 011 (708) 7725

東京営業所：TEL 03 (3813) 8201

大阪営業所：TEL 06 (6304) 9305

福岡営業所：TEL 092 (526) 3618

住所等につきましては下記ホームページにてご確認ください。

ホームページアドレス <http://www.ohwa-tsusho.com>