

機械器具 01 手術台及び治療台  
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDNコード: 70469000

## シーラー・OTZ下肢牽引器

### \*\*【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状

##### ①シートプレート



※ 耐荷重: 220kg まで

##### ②ベースフレーム



##### ③牽引調整ユニット (シューホルダー)



##### ④膝受けフレーム



##### ⑤側臥位用股間ユニット



##### ⑥SRクランプ・アタッチメント



##### ⑦牽引シューズ



##### ⑧ロールパッド・ホルダー



##### ⑨ロールパッド



##### ⑩牽引ブーツ・ホルダー



##### ⑪キルシュナー・馬蹄フレームホルダー



##### ⑫レッグサポート



##### ⑬レッグプレート/レッグプレートJ




##### ⑭牽引ブーツ



##### ⑮テーブル幅・拡張板/テーブル幅・拡張板J



##### ⑯OTZ収納ボード

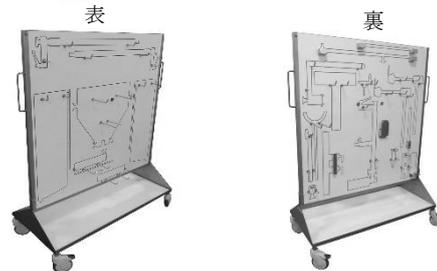

##### ⑰OTZ延長板/OTZ延長板J



##### ⑱OTZヘッドレスト用アダプタ



本品は、使用者の選択に応じて以下を構成医療機器に含む場合がある。

<構成医療機器> 製造販売業者：欧和通商株式会社（自社）

品番/構成品名称	販売名	届出番号
90041/ヘッドレストホルダー（丸穴）	シーラー・手術台 アクセサリ (AXIS用)	13B1X00167000146
90003/馬蹄型ヘッドレスト		
90001/フラットヘッドレスト		
90566/ラジオルーセントヘルメット	ショルダーポジショニングプレート	13B1X00167000247

## 2. 原材料

品名	原材料
①シートプレート	ウレタン・フォーム、炭素繊維強化プラスチック、サーモプラスチック、ステンレス鋼
②ベースフレーム	ステンレス鋼、アルミニウム合金、サーモプラスチック
③牽引調整ユニット（シューホルダー）	ステンレス鋼、アルミニウム合金、サーモプラスチック
④膝受けフレーム	モルトブレン・フォーム、ステンレス鋼、アルミニウム合金、サーモプラスチック
⑤側臥位用股間ユニット	サーモプラスチック、モルトブレン・フォーム、ステンレス鋼
⑥SRクランプ・アタッチメント	ステンレス鋼
⑦牽引シューズ	牛革、ステンレス鋼
⑧ロールパッド・ホルダー	ステンレス鋼
⑨ロールパッド	ポリエステル・フォーム
⑩牽引ブーツ・ホルダー	ステンレス鋼
⑪キルシュナー・馬蹄フレームホルダー	サーモプラスチック、ステンレス鋼
⑫レッグサポート	サーモプラスチック、モルトブレン・フォーム、ステンレス鋼
⑬レッグプレート/レッグプレートJ	ウレタン・フォーム、炭素繊維強化プラスチック、ステンレス鋼
⑭牽引ブーツ	サーモプラスチック、アルミニウム合金、ポリエステル・フォーム
⑮テーブル幅・拡張板/テーブル幅・拡張板J	ウレタン・フォーム、炭素繊維強化プラスチック、サーモプラスチック、ステンレス鋼
⑯OTZ収納ボード	芯：木材、枠：一般炭素鋼、表面：プラスチック
⑰OTZ延長板/OTZ延長板J	ウレタン・フォーム、炭素繊維強化プラスチック、サーモプラスチック、ステンレス鋼
⑱OTZヘッドレスト用アダプタ	サーモプラスチック、ステンレス鋼

## 3. 寸法等

外装に記載

### 【使用目的又は効果】

本品は、arcus手術台又はAXIS手術台(共にスイス・シーラー社製、別売品)に接続し、下肢又は肩の手術時に必要な体位を得るために使用する。

## \*\*【使用方法等】

### 1. 組み合わせて使用する医療機器

本品はスイス・シーラー社製のarcus手術台又はAXIS手術台に接続して使用する。

販売名	届出番号
電動式手術台 AXIS500	13B1X00167000158
電動式手術台 arcus501	13B1X00167000190
電動式手術台 arcus601	13B1X00167000191

### 2. 使用方法

使用方法の詳細は取扱説明書を参照のこと。

<下肢の手術時>

- ①手術台にシートプレートを接続する。
- ②手術手技に合わせてベースフレーム、レッグプレート等を選択し、シートプレートに接続する。
- ③ベースフレームに牽引調整ユニットを接続する。
- ④牽引調整ユニットに牽引シューズを接続する。
- ⑤各部を動かし、患者に合わせて位置を調整する。
- ⑥患者を載せてポジションを整え、各部を確実に固定する。

<肩の手術時>

- ①手術台にシートプレートを接続する。
- ②シートプレートにOTZヘッドレスト用アダプタを取付け、ヘッドレストホルダー（丸穴）（別売品）を介して、馬蹄型ヘッドレスト/フラットヘッドレスト/ラジオルーセントヘルメット（すべて別売品）のいずれかを取付ける。
- ③手術台とシートプレートの間にOTZ延長板/OTZ延長板Jを接続することで、背板の高さの調節、及び、延長板のサイドレールに手術台アクセサリを取付けることが可能。

<下肢手術：使用例>



<肩手術：使用例>



### 【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 使用前に本品と手術台が確実に接続・固定されていることを必ず確認すること。[落下事故防止のため]
2. 各接続部のノブを緩める際は、必ず手を添えて緩める前の状態を維持しながら実施すること。[落下事故防止のため]
3. 手術台(別売品)に本品を接続した後、各アクセサリの上だけに乗ったり、座ったりしないこと。[横転、破損防止のため]
4. 操作中は各部位の隙間に手や指を入れないこと。[怪我防止のため]

### 【保管方法及び有効期間等】

ネジ等の部品の紛失に注意し、OTZ収納ボードを用いて保管すること。

**\*\*【保守・点検に係る事項】**

洗浄方法

- ① 使用後は速やかに中性洗剤で洗浄（手洗い）又は消毒用エタノール等で清拭し、付着物を取り除くこと。
- ② 機械による洗浄（ウォッシャーディスインフェクターの類）及び水中に浸け置きはしないこと。[防水構造では無いため]
- ③ 苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗剤は腐食の原因となり、材質の劣化を著しく早めるため使用しないこと。
- ④ 中性洗剤であってもアルミニウムには使用できないタイプがあるため、事前に洗剤の説明書にて使用の可否を必ず確認すること。
- ⑤ 金属たわし、磨き粉（クレンザー等）の類は使用しないこと。
- ⑥ 乾熱乾燥器の類は使用しないこと。
- ⑦ 本品は滅菌の必要はない。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

< 製造販売業者 >

欧和通商株式会社：TEL 03 (5803) 7172

< 製造業者 >

日本語名：シーラー・メディカル社（スイス）

英 名：S c h a e r e r M e d i c a l A G (Switzerland)

< 問い合わせ先 >

欧和通商株式会社 札幌営業所：TEL 011 (708) 7725

東京営業所：TEL 03 (3813) 8201

大阪営業所：TEL 06 (6304) 9305

福岡営業所：TEL 092 (526) 3618

住所等につきましては下記ホームページにてご確認願います。

ホームページアドレス <http://www.ohwa-tsusho.com>