

**2023 年 05 月（第 3 版）
*2017 年 05 月（第 2 版）

機械器具 30 結紮器及び縫合器
一般医療機器 持針器 JMDN コード：12726010

コーロス・マイクロ持針器

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状

① 全体形状



② 先端形状



2. 原材料

ステンレス鋼（先端内側：タングステンカーバイド）

3. 寸法等

外装に記載

② 重大な有害事象

- ・血管、神経、組織、骨、内臓又は関節の損傷及び穿孔、出血、疼痛、硬膜損傷（髄液漏）、骨折又は神経障害等
- ・感染
- ・破損片の体内遺残
- ・アレルギー反応
- ・本品の不具合によって起こる手術時間の延長、手技の変更及び再手術

③ その他の有害事象

- ・患者及び手術従事者の負傷

3. 相互作用

〔併用注意〕（併用に注意すること）

電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器械の表面を損傷するので、併用には注意すること。

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
電気手術器 （電気メス）	使用禁止	術者が感電、火傷をする危険性がある。

**【使用目的又は効果】

本品はハンドルをもつ手術器具であり、縫合時に縫合針を把持するために用いる。

【使用方法等】

- ①使用前に洗浄及び滅菌を行う。
- ②使用者がハンドル部を操作し、回転軸のある 2 枚の刃を開閉させて縫合針を把持する。
- ③使用後は速やかに洗浄及び滅菌を行い、適切に保管する。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ①本品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄及び滅菌を行ってから使用すること。（【保守・点検に係る事項】の項を参照）
- ②本品は糸号数 7-0 用の縫合針の把持を想定して設計されているため、想定を超えた太い針を把持した場合は確実な把持が出来ない又は先端部の折損等の不具合が生じる。
- ③本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- ④本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。
- ⑤本品は度重なる洗浄・滅菌及び使用による金属疲労により、破損する場合がある。

2. 不具合・有害事象

① 重大な不具合

- ・本品の破損又は変形
- ・本品の機能不良

**【保管方法及び有効期間等】

1. 先端部を保護し、重量物の下にならない様、マイクロ器具用のケース等を用いて保管すること。
2. 保管時にはキャッチをかけず解放した状態にすること。

**【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後の点検
外観、機構等、異常がないことを確認すること。
2. 故障時のお願い
異常のあるもの及びその疑いのあるものは使用を中止し、本文書の問い合わせ先に連絡するか新しい物と取り替えること。
3. 洗浄方法
(1) 手洗い洗浄
①使用後は速やかに医療用中性洗浄剤等で洗浄し、付着物を取除くこと。
②苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗浄剤や、その他のアルカリ性又は酸性の洗浄剤は腐食の原因となるため、使用しないこと。
③中性洗浄剤を用いて、ブラシ等で本品を洗浄すること。
④本品を 1 分間流水ですすぐこと。
(2) 機械洗浄
①機械洗浄機及び洗浄剤の製造元が定める使用手順及び取扱説明書の指示に従うこと。
②洗浄・消毒サイクルの一部として乾燥が行われる場合は、85℃を超えないようにすること。
③すすぎは、50℃で 5 分間行うこと。
④すすぎの際は、脱イオン水又は脱塩素水等を使用すること。
(3) 金属たわし及び磨き粉(クレンザー等)の類は使用しないこと。
(4) 洗浄により確実に付着物を取り除くこと。

- (5)可動部及び接続部を有しており、動きをスムーズに保つために、洗浄、乾燥後に医療用潤滑剤を塗布すること。[完全に脱脂された状態で使用し続けると摩耗による動作不良の原因となる。]

4. 滅菌方法

- (1) 汚れ又は洗浄剤が残った状態で滅菌を行わないこと。
- (2) 本品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄し、各医療機関により確認された条件にて滅菌を行うこと。

<製造元による推奨滅菌条件>

滅菌方法	滅菌条件
高圧蒸気滅菌 (プレバキューム式)	温度 : 132 ℃ 時間 : 4 分間 乾燥時間 : 30 分

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

欧和通商株式会社 : TEL 03 (5803) 7172

<製造業者>

日本語名 : コーロス社 (アメリカ合衆国)

英 名 : KOROS USA, Inc. Facility
(USA)

<問い合わせ先>

欧和通商株式会社 札幌営業所 : TEL 011 (708) 7725

東京営業所 : TEL 03 (3813) 8201

大阪営業所 : TEL 06 (6304) 9305

福岡営業所 : TEL 092 (526) 3618

住所等につきましては下記ホームページにてご確認願います。

ホームページアドレス <http://www.ohwa-tsusho.com>