

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDNコード：70469000
ショルダーポジショニングプレート

***【形状・構造及び原理等】**

1. 形状

①ショルダーポジショニングプレート

<組立図>



a. ベースプレート

<表>



<裏>



※耐荷重（裏面に表示）

b. サイドプレート（右、左）

<表>



<裏>



②SP用ヘッドレストホルダー



③ラジオーレントヘルメット



2. 原材料

- ・ステンレス鋼
- ・アルミニウム合金
- ・ウレタンフォーム
- ・炭素繊維強化プラスチック

3. 寸法等

外装に記載

【使用目的又は効果】

本品は、シーラー社製手術台（別売品）に接続し、患者の身体を支持または固定する目的で使用する。

***【使用方法等】**

1. 組み合わせて使用する医療機器

本品はスイス・シーラー社製の手術台および手術台アクセサリと併用して使用できる。代表的な併用医療機器は下記のとおり。

販売名	届出番号
シーラー・手術台アクセサリ（AXIS用）	13B1X00167000146
電動式手術台 arcus 501	13B1X00167000190
電動式手術台 arcus 601	13B1X00167000191

2. 使用方法（詳細は取扱説明書を参照のこと）

- ① シーラー社製手術台（別売品）にベースプレートを差込み、手術台のアクセサリ固定レバーを締める。
- ② 必要に応じてサイドプレートをベースプレートに取り付ける。
- ③ ベースプレートにSP用ヘッドレストホルダーを取り付ける。
- ④ ラジオーレントヘルメット又はヘッドレスト（別売品）をSP用ヘッドレストホルダーに取り付ける。
- ⑤ 患者の頭部の位置に合わせて、ショルダーポジショニングプレートの高さ及びSP用ヘッドレストホルダーの角度を調節する。

<使用例>



***【使用上の注意】**

重要な基本的注意

1. 手術台のアクセサリ固定レバーを確実に締めること。[脱落防止、患者または医療従事者への危害防止のため]
2. 手術台（別売品）に本品を接続した後、各アクセサリの上だけに乗ったり座ったりしないこと。[手術台の横転、破損防止のため]

【保管方法及び有効期間等】

ネジ等の部品の紛失に注意し、高温、高湿、直射日光を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

洗浄方法

- ①使用後は消毒用エタノール等で清拭し、速やかに付着物を取り除くこと。
- ②クリーナーの直接の噴霧、水洗い等はしないこと。（防水構造ではないため）
- ③洗浄に際しては中性の洗浄剤を使用し、脱イオン水、脱塩素水にて十分すすぐこと。
- ④付着物等を取り除く際、シンナー、ベンジン等の溶剤は使用しないこと。
- ⑤酸性、及びアルカリ性の洗浄剤は腐食の原因となるため、使用しないこと。
- ⑥本品は滅菌の必要はない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

欧和通商株式会社：TEL 03（5803）7172

＜外国製造業者＞

日本語名：シーラー・メディカル社（スイス）

英 名：Schaerer Medical AG（Switzerland）

＜問い合わせ先＞

欧和通商株式会社 札幌営業所：TEL 011（708）7725

東京営業所：TEL 03（3813）8201

大阪営業所：TEL 06（6304）9305

福岡営業所：TEL 092（526）3618

住所等につきましては下記ホームページにてご確認願います。

ホームページアドレス <http://www.ohwa-tsusho.com>