

**2023 年 09 月（第 4 版）


*2020 年 02 月（第 3 版）

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDN コード：70469000

カーボン用サイドレール J

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

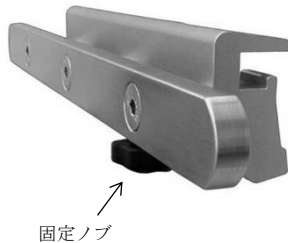

2. 原材料

ステンレス鋼
アルミニウム合金
サーモプラスチック

3. 寸法等

外装に記載

4. 耐荷重

20kg

【使用目的又は効果】

本品は、手術台に接続されたカーボン板に設置し、本品を介して手術台アクセサリを取り付ける目的で使用する。

【使用方法等】

1. 組み合わせて使用する医療機器

本品は、スイス・シーラー社製の手術台アクセサリと併用して使用できる。代表的な併用医療機器は下記のとおり。

販売名	届出番号
シーラー・手術台アクセサリ	13B1X00167000145
シーラー・手術台アクセサリ（AXIS 用）	13B1X00167000146
シーラー・手術台アクセサリ（arcus 用）	13B1X00167000192

製造販売業者：欧和通商株式会社（自社）

2. 使用方法

①手術台に接続されたシーラー社製のカーボン板（別売品）に本品を取り付け、固定ノブを締めて固定する。

②本品に手術台アクセサリ（別売品）を取り付ける。

**【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 使用前に手術台、カーボン板、本品、手術台アクセサリが確実に接続・固定されていることを確認すること。[落下事故防止のため]
- 使用する手術台アクセサリの組み合わせによって耐荷重が変動するため、併用する各アクセサリの取扱説明書に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温、高湿、直射日光を避けて保管すること。

**【保守・点検に係る事項】

洗浄方法

①使用後は速やかに中性洗剤で洗浄（手洗い）又は消毒用エタノール等で清拭し、付着物を取除くこと。

②機械による洗浄（ウォッシャーディスインフェクターの類）及び水中に浸け置きはしないこと。

③苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗浄剤や、その他のアルカリ性、酸性の洗浄剤は腐食の原因となり、材質の劣化を著しく早めるため使用しないこと。

④中性洗剤であってもアルミニウムには使用できないタイプがあるため、事前に洗浄剤の説明書にて使用の可否を必ず確認すること。

⑤金属たわし、磨き粉（クレンザー等）の類は使用しないこと。

⑥脱イオン水又は脱塩素水で十分すすぎ、乾燥させること。

⑦乾熱乾燥器の類は使用しないこと。

⑧本品は滅菌の必要はない。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

欧和通商株式会社：TEL 03（5803）7172

<製造業者>

有限会社大響機工

<問い合わせ先>

欧和通商株式会社 札幌営業所：TEL 011（708）7725

東京営業所：TEL 03（3813）8201

大阪営業所：TEL 06（6304）9305

福岡営業所：TEL 092（526）3618

住所等につきましては下記ホームページにてご確認ください。

ホームページアドレス <http://www.ohwa-tsusho.com>