

*2023 年 09 月（第 2 版）
2018 年 09 月（第 1 版）

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDN コード：70469000
シーラー・ラジオーレント下肢牽引器

***【形状・構造及び原理等】**

<セット>

ラジオーレント下肢牽引器セット

<セット構成品>

番号	品名	原材料
①	ベースユニット（パッドなし）	紙基材フェノール樹脂積層板、ステンレス鋼、冷延鋼板、アルミニウム合金
②	脚台（パッド付）	ポリウレタンフォーム、ポリプロピレン、ステンレス鋼、冷延鋼板
③	股間支柱（X線透過型）	ナイロン樹脂、ステンレス鋼
④	股間支柱用ロールパッド	クロロプレンゴム
⑤	オフセット対牽引柱台	冷延鋼板、ポリウレタンフォーム
⑥	支脚器	ポリウレタンフォーム、ステンレス鋼
⑦	トラクションブーツ支脚器	ポリウレタンフォーム、ナイロン樹脂、ABS樹脂、ステンレス鋼
⑧	トラクションユニット	ステンレス鋼
⑨	サイドレールソケット	ステンレス鋼、アルミニウム青銅
⑩	延長サイドレール	ステンレス鋼
⑪	牽引バー	アルミニウム合金、カーボンファイバー、真ちゅう、ステンレス鋼
⑫	延長クランプ	ステンレス鋼、アルミニウム合金
⑬	ドレープロッド	ステンレス鋼、ナイロン樹脂
⑭	牽引パークランプ	ステンレス鋼、アルミニウム合金
⑮	支脚用アーム	アルミニウム合金、ステンレス鋼
⑯	下肢牽引器用カート	冷間引抜鋼管

<オプション品>

番号	品名	原材料
①	側臥位用股間支柱	冷延鋼板、ポリウレタンフォーム
②	ティビアエクステンダー	アルミニウム合金
③	フットボード	冷延鋼板、ポリプロピレン、ポリウレタンフォーム
④	直達牽引器	アルミニウム合金、ステンレス鋼
⑤	トラクションブーツインサート	ポリウレタンフォーム
⑥	ベースユニット用パッド（右、左）	ポリウレタンフォーム

<セット構成品>

①ベースユニット（パッドなし）

※耐荷重：約 227kg

<組立図>



・ボード

・ベース



②脚台（パッド付）

※耐荷重：約 68kg

<組立図>



・パッド

・ボード



③股間支柱（X線透過型）

④股間支柱用ロールパッド



⑤オフセット対牽引柱台

・アダプター

・パッド



⑥支脚器

⑦トラクションブーツ支脚器



取扱説明書を必ずご参照下さい

⑧トラクションユニット



⑨サイドレールソケット
※耐荷重：約 227kg



⑩延長サイドレール



⑪牽引バー
※耐荷重：約 45kg



⑫延長クランプ



⑬ドレープロッド



⑭牽引パークランプ



⑮支脚用アーム



⑯下肢牽引器用カート



<オプション品>

①側臥位用股間支柱



②ティビエクステンダー



③フットボード



④直達牽引器
※ホルダー（5組）が付属する。



<ホルダー>



⑤トラクションブーツインサート



⑥ベースユニット用パッド

・ベースユニット用パッド右 ・ベースユニット用パッド左



<寸法>
外装に表示

【使用目的又は効果】

本品は、シーラー社製手術台に接続し、主に整形外科手術の際に患者の下肢を牽引する目的で使用する。

*【使用方法等】

1. 組み合わせて使用する医療機器

本品はシーラー社製手術台と併用して使用できる。代表的な併用医療機器は下記のとおり。

販売名	製造販売届出番号
電動式手術台 arcus 501	13B1X00167000191
電動式手術台 arcus 601	13B1X00167000192

2. 使用方法

使用方法の詳細は取扱説明書を参照のこと。

①シーラー社製手術台（別売品）にベースユニットのベースを取り付け、ボードとパッドを設置する。

②牽引バーをベースに取り付ける。

③必要に応じて、脚台、股間支柱、トラクションブーツ、オプション品等を施術に合わせて取り付けていく。
※脚台はセットアップの際に一時的に患者足部を支持する為のみに使用し、手術中には使用しないこと。

④患者に合わせて各構成品の位置を調節する。

⑤患者足部にトラクションブーツまたは直達牽引器を取り付け、牽引を行う。

⑥使用後は清拭にて付着物を取り除き、下肢牽引器用カートを用いて保管すること。

*【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 使用前に本品と手術台が確実に接続・固定されていることを必ず確認すること。[落下事故防止のため]
2. 【形状・構造及び原理等】に示す耐荷重を超えた使用をしないこと。[作動不良、破損防止のため]
3. MRI 下での使用禁止。[非磁性体ではないため]
4. 他製品と組み合わせての使用禁止。

【保管方法及び有効期間等】

下肢牽引器用カートを用いて高温、高湿、直射日光を避けて保管すること。

*【保守・点検に係る事項】

洗浄方法

- ①本品は滅菌の必要はない。
- ②使用後は速やかに中性の洗浄剤を用いて清拭し、速やかに付着物を取り除くこと。
- ③クリーナーの直接の噴霧、水洗い等はしないこと。
- ④血液、体液等の付着物が長時間放置により落ちにくくなっている場合、5%の酢酸溶液や白酢を用いることを推奨する。
- ⑤ヨードホルムを含む洗浄剤は使用しないこと。

※本品は度重なる洗浄及び使用による金属疲労により、破損する場合があります。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売者>

欧和通商株式会社：TEL 03 (5803) 7172

<製造業者>

日本語名：シーラーメディカル USA 社（アメリカ合衆国）

英 名：Schaerer Medical USA, Inc. (U.S.A.)

<問い合わせ先>

欧和通商株式会社 札幌営業所：TEL 011 (708) 7725

東京営業所：TEL 03 (3813) 8201

大阪営業所：TEL 06 (6304) 9305

福岡営業所：TEL 092 (526) 3618

住所等につきましては下記ホームページにてご確認願います。

ホームページアドレス <http://www.ohwa-tsusho.com>