

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDN コード: 70469000
シーラーUS・手術台アクセサリ

【警告】

- ①患者を長時間にわたって同一の体位に保つことや、皮膚に過度な圧迫がかかることは、神経麻痺や褥瘡等の原因となる場合があることに留意し、患者の状態に配慮するとともに長時間の圧迫は避けること。
- ②正しく患者の位置を決めて、継続的な観察を維持すること。
[間違った患者のポジショニングにより生命機能が害される場合があるため]

【禁忌・禁止】

シーラー社製以外の手術台と組み合わせて使用しないこと。
[寸法が異なり装着できないため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

- ①arcus501 (背板用パッドS) ②arcus501 (腰板用パッドS)



- ③HD交換パッドS ④arcus延長板交換パッドS/長



- ⑤arcus延長板交換パッドS/短 ⑥カーボン製 上肢板用パッドS




- ⑦カーボン板用パッドS ⑧SPカーボン板 (ロング) 用パッドS



- ⑨LG-1 交換パッドSセット

<構成品>

- a. LG-1 交換ロングパッドS/左
- b. LG-1 交換三角パッドS/左
- c. LG-1 交換ロングパッドS/右
- d. LG-1 交換三角パッドS/右

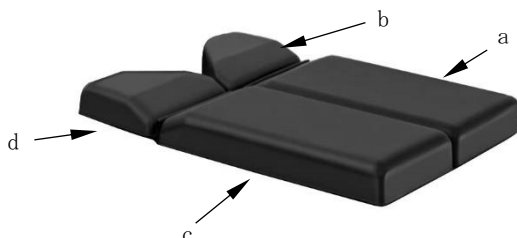

2. 寸法等
外装に記載

3. 原材料
ウレタンフォーム

【使用目的又は効果】

本品は、汎用電動式手術台に接続し、患者の身体を支持する目的で使用する。

***【使用方法等】**

1. 組み合わせて使用する医療機器

本品はシーラー社製手術台と併用して使用できる。代表的な併用医療機器は下記のとおり。

販売名	製造販売届出番号
電動式手術台 arcus 501	13B1X00167000191
電動式手術台 arcus 601	13B1X00167000192

製造販売業者: 欧和通商株式会社 (自社)

2. 使用方法

- ①必要に応じてシーラー社製手術台 (別売品) に取付け、患者を支える。

②パッドの取り付け

- 1 マジックテープと並ぶようにパッドを置く。
- 2 パッドをしっかり押す。
- 3 パッドがずれることなく、しっかり固定されていることを確認する。

③パッドの取り外し。

- 1 取り外す際は、パッドを両手で保持し、取り外す。

④使用後は清拭にて付着物を取り除き、保管する。

<使用例>



***【使用上の注意】**

重要な基本的注意

1. パッドをシーラー社製手術台 (別売品) に固定する際は、マジックテープに異物や汚れが付着していないことを確認すること。
2. パッドの上に尖った物または鋭利な物を置かないこと。また、パッドを尖っている又は角が鋭利な物体上に置いたり、その上でずらしたりしないこと。[パッドが破損する恐れがあるため]
3. パッドがマジックテープで正確に固定できない場合、またはマジックテープに摩擦や湿り、緩み等がある場合には使用しないこと。[患者が落下する恐れがあるため]

【保管方法及び有効期間等】

高温、高湿、直射日光を避けて水のかからない場所で保管すること。

***【保守・点検に係る事項】**

洗浄方法

- ①本品は滅菌の必要はない。
- ②使用後は速やかに中性の洗浄剤を用いて清拭し、速やかに付着物を取り除くこと。
- ③クリーナーの直接の噴霧、水洗い等はしないこと。
- ④血液、体液等の付着物が長時間放置により落ちにくくなっている場合、5%の酢酸溶液や白酢を用いることを推奨する。
- ⑤ヨードホルムを含む洗浄剤は使用しないこと。
- ⑥マジックテープの汚れはプラスチック製のくしで汚れを取り除くこと。[装着力が低下するため]

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

欧和通商株式会社：TEL 03（5803）7172

＜製造業者＞

日本語名：シーラーメディカル USA 社（アメリカ合衆国）

英 名：Schaerer Medical USA, Inc. (U.S.A.)

＜問い合わせ先＞

欧和通商株式会社 札幌営業所：TEL 011（708）7725

東京営業所：TEL 03（3813）8201

大阪営業所：TEL 06（6304）9305

福岡営業所：TEL 092（526）3618

住所等につきましては下記ホームページにてご確認願います。

ホームページアドレス <http://www.ohwa-tsusho.com>