


機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDN コード：70469000
ベースユニットアダプタ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状


サイドレール取付型

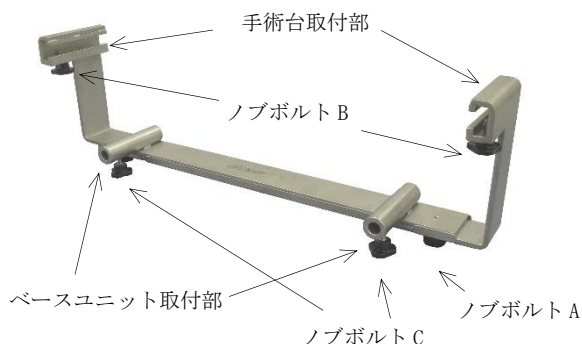

2. 原材料

主材：ステンレス鋼
ノブボルト：ステンレス鋼、樹脂

3. 寸法等

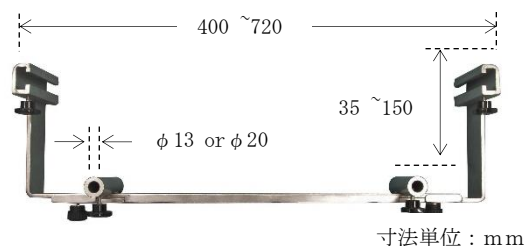

【使用目的又は効果】

本品は、主に脳神経外科における頭蓋内外の様々な手術の際、汎用電動式手術台と頭部手術用クランプを接続、固定する器具として使用する。

【使用方法等】

1. 組み合わせて使用する医療機器

販売名	メイフィールド・ベースユニット
届出番号	13B1X00167000039
販売名	メイフィールド・ウルトラ 360・ポジショニングシステム
届出番号	13B1X00167000046
販売名	メイフィールド・ウルトラ 360・ポジショニングシステム（ミズホタイプ）
届出番号	13B1X00167000116
販売名	メイフィールド・MF 2 ベースユニット
届出番号	13B1X00167000215

2. 汎用電動式手術台のサイドレール幅に合わせて本品をスライドさせ、ノブボルト A を用いて確実に固定する。

3. 手術台への接続

汎用電動式手術台のサイドレールに本品の手術台取付部をスライドさせて取付け、ノブボルト B を用いて確実に固定する。

4. ベースユニットの取付け

本品のベースユニット取付部に、インテグラ社製ベースユニット（別売品）を深く差し込み、ノブボルト C を用いて確実に固定する。

*【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 手術台と本品、本品とベースユニットが確実に接続・固定されていることを確認すること。[落下事故防止のため]
2. インテグラ社製以外のベースユニットと組み合わせて使用しないこと。[作動不良、故障の原因となるため]

【保管方法及び有効期間等】

ノブボルト等の部品の紛失に注意し、高温、高湿、直射日光を避けて保管すること。

*【保守・点検に係る事項】

洗浄方法

- ① 使用後は速やかに中性洗剤で洗浄又は消毒用エタノール等で清拭し、付着物を取除くこと。
- ② 苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗浄剤や、その他のアルカリ性、酸性の洗浄剤は腐食の原因となり、材質の劣化を著しく早めるため使用しないこと。
- ③ 金属たわし、磨き粉（クレンザー等）の類は使用しないこと。
- ④ 洗浄後、速やかに乾燥させること。
- ⑤ 本品は滅菌の必要はない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

欧和通商株式会社：TEL 03 (5803) 7172

<製造業者>

有限会社大響機工

<問い合わせ先>

欧和通商株式会社 札幌営業所：TEL 011 (708) 7725

東京営業所：TEL 03 (3813) 8201

大阪営業所：TEL 06 (6304) 9305

福岡営業所：TEL 092 (526) 3618

住所等につきましては下記ホームページにてご確認願います。

ホームページアドレス <http://www.ohwa-tsusho.com>