

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDN コード：70469000
オーワ・オーバーテーブルV 2

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

*＜セット＞


名称
オーワ・オーバーテーブルV 2



*＜セット構成品＞

番号	上段：品名／下段：概要
①	テーブルフレーム 支脚へ取り付け、支脚の傾斜の範囲で水平旋回する
②	トレー 滅菌を行った上でテーブルフレーム上へ設置し、外科手術の際に鋼製小物等を置く
③	支脚 手術台へ接続する
④	サイドサポート
⑤	バックサポート テーブルフレームへ取り付け、滅菌済みの覆布を掛けて、清潔野との区別をする（④⑤共通）
⑥	フロントサポート テーブルフレームへ取り付け、滅菌済みの覆布をかけて頭皮フック等を保持する

① テーブルフレーム

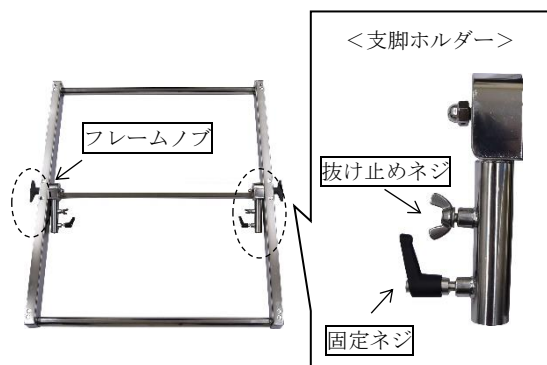

**※サイドサポート用の内穴 8 カ所、バックサポート・フロントサポート両用の外穴 4 カ所を持つ。

② トレー



③ 支脚



④ サイドサポート



⑤ バックサポート



⑥ フロントサポート



**2. 原理

市販のサイドレールクランプに接続した支脚が回転し、支脚の傾斜の範囲でテーブルフレームが水平旋回する。

**3. 原材料

- ① テーブルフレーム：ステンレス鋼、ナイロン
② トレー、③ 支脚：ステンレス鋼
④ サイドサポート、⑤ バックサポート、⑥ フロントサポート：アルミニウム

4. 寸法等

外装に記載

5. 耐荷重

10kg

*【使用目的又は効果】

本品は外科手術の際、手術台に取り付けて使用することを目的とする。

**【使用方法等】

1. トレーは使用前に洗浄し、覆布で包んで滅菌を行う。
2. テーブルフレームのフレームノブ、抜け止めネジ、固定ネジを緩める。
3. テーブルフレームの支脚ホルダーに支脚を奥まで差し込み、抜け止めネジを締めて支脚が抜けないようにする。
4. 手術台のサイドレールに市販のサイドレールクランプを装着する。
5. 市販のサイドレールクランプに、テーブルフレームと接続した支脚を差し込む。
6. 支脚を回転させることでテーブルフレームが水平旋回し、位置を調節できる。適切な位置で市販のサイドレールクランプのネジを締め、支脚を固定する。
7. 固定ネジ、フレームノブの順に締め、テーブルフレームを固定する。
8. 必要に応じてテーブルフレームにフロントサポート、サイドサポート、バックサポートを取り付ける。内穴にサイドサポート、外穴にフロントサポート・バックサポートを取り付ける。
9. テーブルフレームにトレーをのせ、トレーの上に覆布を数枚かけて清潔区域と不潔区域を区別する。
10. 使用後、トレーは速やかに洗浄し、覆布で包んで滅菌を行い、適切に保管する。その他の機器は清拭し、汚れを落としてから適切に保管する。

<使用例>



**【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品は使用前に必ず洗浄を行うこと。トレーは、洗浄後に滅菌を行うこと。トレー以外は滅菌の必要はない。（【保守・点検に係る事項】の項を参照）
2. 各ネジには抜け止め防止の機能がないため、ネジの紛失に気をつけること。

【保管方法及び有効期間等】

ネジ等の部品の紛失に注意し、高温、高湿、直射日光を避けて保管すること。

**【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄方法
<トレーの洗浄>
 - ①使用後は速やかに中性洗剤で洗浄し、付着物を取除くこと。
 - ②苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗浄剤や、その他のアルカリ性、酸性の洗浄剤は腐食の原因となり、材質の劣化を著しく早めるため使用しないこと。
 - ③金属たわし、磨き粉（クレンザー等）の類は使用しないこと。
 - ④脱イオン水又は脱塩素水で十分すすぎ、乾燥させること。

<トレー以外の洗浄>

- ①使用後は速やかに消毒用エタノール等で清拭し、付着物を取除くこと。
- ②付着物等を取り除く際、シンナー、ベンジン等の溶剤は腐食の原因となるため、使用しないこと。
- ③機械による洗浄（ウォッシャーディスインフェクターの類）は行わないこと。
- ④薬液等が付着した状態で放置しないこと。
- ⑤金属たわし、磨き粉（クレンザー等）の類は使用しないこと。

2. 滅菌方法

- ①トレー以外は滅菌の必要はない。
- ②トレーは使用前に必ず洗浄し、各医療機関により確認された条件にて滅菌を行うこと。
※本品は度重なる洗浄・滅菌及び使用による金属疲労により、破損する場合があります。

滅菌条件の一例

滅菌方法	滅菌温度	保持時間
高圧蒸気滅菌	121℃	15 分
	126℃	10 分
	134℃	3 分

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

欧和通商株式会社：TEL 03（5803）7172

<製造業者>

株式会社英技研

<問い合わせ先>

欧和通商株式会社 札幌営業所：TEL 011（708）7725

東京営業所：TEL 03（3813）8201

大阪営業所：TEL 06（6304）9305

福岡営業所：TEL 092（526）3618

住所等につきましては下記ホームページにてご確認願います。

ホームページアドレス <http://www.ohwa-tsusho.com>