

医04 整形用品

一般医療機器 コットンボール 11028000

オオサキツッペル

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止	【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 製造販売業者 オオサキメディカル株式会社 お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039
-------------------------	---

【形状・構造及び原理等】
綿100%のガーゼを硬く巻き込んだ製品です。

【使用目的又は効果】
様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・創傷面には、滅菌して使用すること。
- ・滅菌は、高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。